

Od 1967 roku jesteśmy
ekspertem w dziedzinie
systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów
przywoławczych dla
obiektów medycznych
i użyteczności publicznej
(WC dla niepełnosprawnych),
domów pomocy społecznej,
sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane
są z najwyższej jakości
podzespołów i obudów z
tworzywa ABS - objęte są
3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia
systemu Callnet spełniają
wymogi dyrektywy EMC i
oznakowane są europejskim
znakiem CE.

KARTY KATALOGOWE URZĄDZEŃ SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO



CALLNET - wariant ALARMOWY

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA


Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.



Przykład realizacji systemu przywoławczego

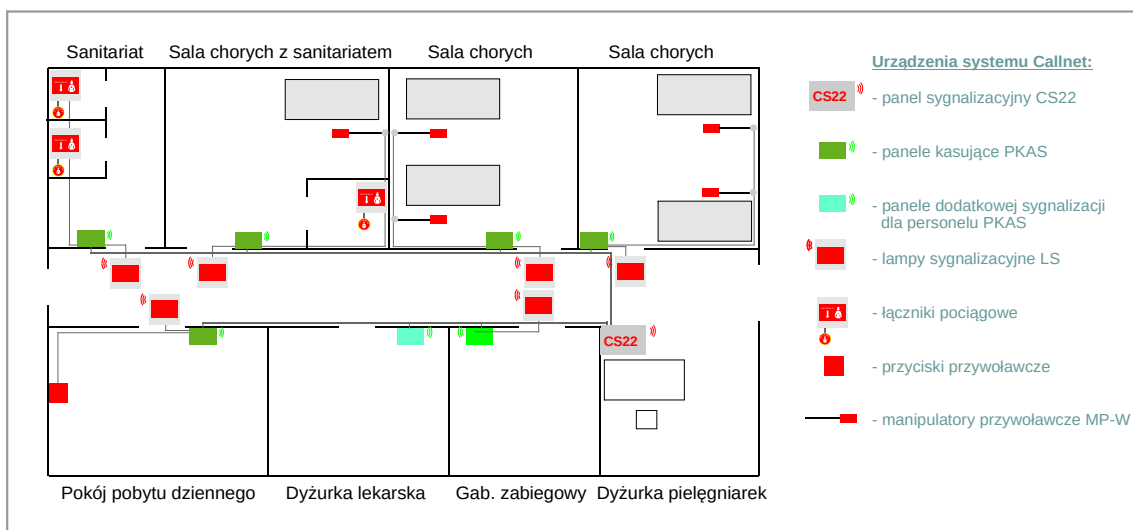

CHARAKTERYSTYKA:

- MAKSYMALNY zestaw funkcji użytkowych: **wezwania, alarm, przekazywanie zgłoszeń**:
 - czerwony kolor i sygnał akustyczny dla wezwań od pacjentów z sal chorych i sanitariatów,
 - kasowanie wezwań w panelu PKAS po przybyciu pielęgniarki do sali,
 - **najwyższy priorytet dla ALARMÓW włączanych przez personel (z czasową blokadą wezwań od pacjentów)**,
 - **akustyczne przekazywanie wszystkich zgłoszeń z oddziału do panelu PKAS w każdej sali**,
- lampy sygnalizacyjne LED w korytarzu z opcjonalnym sygnałem akustycznym,
- wielofunkcyjne panele kasujące PKAS w salach i sanitariatach,
- manipulatory przy łóżkach pacjentów w salach,
- łączniki pociągowe w sanitariatach, przyciski przywoławcze w salach pobytu dziennego,
- 22-numerowa centrala w dyżurce personelu,
- dodatkowe sygnalizatory PKAS w pomieszczeniach personelu.

FUNKCJONOWANIE:

System Callnet w wariantcie ALARMOWYM umożliwia pacjentom wezwanie pomocy z sal (manipulatory przywoławcze), sanitariatów (łączniki pociągowe lub przyciski przywoławcze) oraz pomieszczeń pobytu dziennego - potwierdzeniem zarejestrowania wezwania jest czerwona dioda LED WEZWANIE w panelu PKAS. Aktywacja wezwania powoduje zapalenie w korytarzu nad drzwiami pomieszczenia lampy sygnalizacyjnej LS (kolor czerwony, opcjonalnie sygnał akustyczny) oraz włączenie sygnalizacji w dyżurce personelu w centrali CS18 (opcjonalnie numer pomieszczenia i akustycznie). Oprócz standardowej funkcji rejestracji i kasowania wezwań od pacjentów, panel PKAS pozwala na włączenie przez pielęgniarkę w nagłych wypadkach ALARMU z najwyższym priorytetem (czasowo blokuje wezwania od pacjentów), sygnalizowanego również w dyżurce lekarskiej. Możliwe jest również AKUSTYCZNE przekazywanie informacji o wezwaniach w oddziale za pomocą paneli PKAS do wszystkich sal chorych, po aktywacji przycisku SYGNALIZACJA.

W dyżurkach personelu instalowane są panele PKAS, które zapewniają zawsze OPTYCZNĄ sygnalizację zgłoszeń w oddziale (WEZWANIE - kolor czerwony, ALARM - kolor niebieski) oraz opcjonalnie AKUSTYCZNĄ po włączeniu przycisku SYGNALIZACJA.

W dyżurkach lekarskich, sygnalizowane są wyłącznie ALARMY z najwyższym priorytete.



www.callnet.online

CALLNET - wariant ALARMOWY

Seria COMPACT - panel kasujący PKAS (sale chorych, sanitariaty zbiorcze)

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.



• ZASTOSOWANIE:

Panel kasujący PKAS instalowany jest wewnątrz pomieszczeń przy drzwiach wejściowych i realizuje kilka funkcji w systemie przywoławczym:

- kasowanie wezwań od pacjentów przez personel.
- włączenie przez pielęgniarkę ALARMU z najwyższym priorytetem w nagłych sytuacjach, gdy potrzebna jest dodatkowa pomoc oraz interwencja lekarza,
- akustyczne przekazywanie wezwań z całego oddziału (przekierowanie z centrali).

• DANE TECHNICZNE:

Gabaryty: 120x80x25mm, obudowa natynkowa z tworzywa ABS pokryta folią klawiaturową poliestrową. Przyciski: KASOWANIE, ALARM oraz przełącznik SYGNALIZACJA.

Diody świecące sygnalizujące WEZWANIE (czerwona) i ALARM (niebieska) oraz potwierdzające włączenie funkcji SYGNALIZACJA (zielona). Wbudowany sygnalizator akustyczny (przekazywanie wezwań).

Napięcie robocze: 12V DC z centrali PS15.

Aktywny poziom sygnału wyjściowego: +12V DC (do central PS18, CS22).

• MONTAŻ:

W salach i sanitariatach przy drzwiach wejściowych wewnątrz pomieszczenia, ok. 120-150 cm nad podłogą.

Połączenie przewodowe do panelu sygnalizacyjnego CS22 w dyżurce pielęgniarskiej.

Urządzenie w wersji **NATYNKOWEJ** - zalecana puszką instalacyjną wtyrkową fi.60mm.

• FUNKCJONOWANIE:

Panel PKAS rejestruje wezwania z urządzeń końcowych pacjentów, przekazując je do panelu sygnalizacyjnego CS22 w dyżurce personelu oraz zapalając czerwoną matrycę diod świecących w lampie LS.

Przyjęcie wezwania potwierdzone jest pacjentowi w panelu świeceniem czerwonej diody oraz **opcjonalnie krótkim sygnałem akustycznym** (w zależności od ustawienia przełącznika wewnątrz panelu).

Po przybyciu pielęgniarki do pomieszczenia, skasowania zgłoszenia dokonuje się przyciskiem KASOWANIE.

W sytuacjach, gdy stan pacjenta jest tak ciężki, że konieczna jest dodatkowa pomoc personelu i lekarza, nie opuszczając sali pielęgniarka może włączyć alarm przyciskiem ALARM (niebieska dioda LED) - czasowo zablokowane zostają wszystkie pozostałe wezwania w oddziale i włączona sygnalizacja alarmu z najwyższym priorytetem.

W razie konieczności dłuższego pobytu pielęgniarki w sali, przełącznik SYGNALIZACJA pozwala na akustyczną sygnalizację wszystkich zgłoszeń w oddziale (potwierdzenie - zielona dioda LED).

W gabinetach zabiegowych panel PKAS jest instalowany w celu zapewnienia możliwości wezwania lekarza w nagłych przypadkach (ALARM).



www.callnet.online

CALLNET - wariant ALARMOWY

Seria COMPACT - panel PKAS (dyżurki personelu)

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.



- **ZASTOSOWANIE:**

Panel PKAS instalowany jest w dodatkowych pomieszczeniach personelu i przeznaczony do sygnalizacji wezwań od pacjentów oraz alarmów w oddziale (bez identyfikacji numeru pomieszczenia, co realizuje centrala w dyżurce pielęgniarskiej).
W dyżurkach lekarzy, panel sygnalizuje akustycznie wyłącznie ALARMY (nie sygnalizuje wezwań od pacjentów).

- **DANE TECHNICZNE:**

Gabaryty: 120x80x25mm, obudowa natynkowa z tworzywa ABS pokryta folią klawiaturową poliestrową.
Przyciski: przełącznik SYGNALIZACJA.
Diody świecące sygnalizujące WEZWANIE (czerwona) i ALARM (niebieska) oraz potwierdzające włączenie sygnału akustycznego SYGNALIZACJA (zielona).
Napięcie robocze: 12V DC z centrali PS15.
Aktywny poziom sygnału wyjściowego: +12V DC (do central PS18, CS22).

- **MONTAŻ:**

W dodatkowych pomieszczeniach personelu, wewnątrz przy drzwiach wejściowych lub obok biurka.
Połączenie przewodowe do panelu sygnalizacyjnego CS22 w dyżurce pielęgniarskiej.
Urządzenie w wersji **NATYNKOWEJ** - zalecana puszka instalacyjna wtynkowa fi.60mm.

- **FUNKCJONOWANIE:**

Panel PKAS w dyżurkach personelu sygnalizuje zawsze optycznie:
- wezwania od pacjentów: czerwona dioda LED,
- ALARM w oddziale: niebieska dioda LED.
Po załączeniu przyciskiem SYGNALIZACJA (zielona dioda LED), dodatkowo emitowany jest sygnał akustyczny.
W dyżurkach lekarskich, panel PKAS-P sygnalizuje wyłącznie ALARM (nie sygnalizuje wezwań od pacjentów).

- **UWAGI:**

Do jednej centrali CS22 można dołączyć cztery dodatkowe panele sygnalizacji akustycznej PKAS, poza pojemnością centrali.
Do paneli PKAS nie dołącza się lamp sygnalizacyjnych - pracują one wyłącznie jako sygnalizatory optyczno-akustyczne !



www.callnet.online

CALLNET - wariant ALARMOWY

Seria COMPACT - lampa sygnalizacyjna LS.

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.



• ZASTOSOWANIE:

Lampa sygnalizacyjna LS z serii CALLNET-COMPACT instalowana jest nad drzwiami pomieszczeń w korytarzu i sygnalizuje optycznie oraz akustycznie (z możliwością wyłączenia) wezwania od pacjentów oraz alarmy z sal chorych i sanitariatów.

• DANE TECHNICZNE:

Gabaryty: 80x80x25 mm, obudowa natynkowa z tworzywa ABS w kolorze białym, folia poliestrowa.
Matryca czerwonych diod świecących, układ podtrzymujący wezwania.
Sygnalizator akustyczny z możliwością wyłączenia sygnału.
Napięcie robocze: 12V DC, pobór prądu przy sygnalizacji ok.100 mA.

• MONTAŻ:

W korytarzu, 10-20 cm nad drzwiami pomieszczeń.
Połączenie przewodowe do panelu PKAS.
Urządzenie w wersji **NATYNKOWEJ** - zalecana puszka instalacyjna wtykowa fi.60mm.

• FUNKCJONOWANIE:

Lampa LS sygnalizuje w korytarzu oddziału świeceniem matrycy czerwonych diod świecących i sygnałem akustycznym (z możliwością wyłączenia) wezwania z przycisków przywoławczych, manipulatorów, łączników pociągowych oraz alarmy aktywowane przez personel w nagłych wypadkach (pozostałe lampy w oddziale zostają wtedy czasowo zablokowane).
Kasowanie sygnalizacji następuje w panelu PKAS.



www.callnet.online

CALLNET - wariant ALARMOWY

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.

Seria COMPACT - łącznik pociągowy ŁP



• ZASTOSOWANIE:

Natynkowy łącznik pociągowy ŁP z serii CALLNET-COMPACT instalowany jest wewnątrz sanitariatów i przeznaczony jest do wezwania pomocy przez pacjentów (także w przypadku upadku na podłogę).

• DANE TECHNICZNE:

Gabaryty: 80x80x25 mm, obudowa natynkowa z tworzywa ABS w kolorze białym, folia poliestrowa. Brelok w kolorze czerwonym z piktogramem żelowym, sznur ok.185 cm. Dodatkowa naklejka żelowa "WEZWANIE" na glazurę.

• MONTAŻ:

W sanitariatach ok. 200-220 cm nad podłogą.
Dołączany do panelu PKAS.
Urządzenie w wersji **NATYNKOWEJ** - zalecana puszka instalacyjna wtykowa fi.60mm.

• FUNKCJONOWANIE:

Łącznik pociągowy jest źródłem wezwania dla pacjentów przebywających w sanitariatach, umożliwiając im wezwanie pomocy również w przypadkach upadku na podłogę. Pociągnięcie sznura z brelokiem oznakowanym piktogramem WEZWANIE, aktywuje wezwanie zarejestrowane w panelu PKAS - sygnalizowane jest świeceniem lampy nad drzwiami sanitariatu oraz w centralce w dyżurce personelu.

• UWAGI:

Łączniki pociągowe nie mogą być montowane w obrębie kabin natryskowych oraz bezpośrednio nad wannami ze względu na niebezpieczeństwo zalania urządzenia wodą.



www.callnet.online

CALLNET - wariant ALARMOWY

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią **GWARANCJĄ**.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.



Przycisk przywoławczy WP



• ZASTOSOWANIE:

Przycisk przywoławczy WP instalowany jest w pomieszczeniach pobytu dziennego oraz jako dodatkowe źródło wezwania w sanitariatach (oprócz łączników pociągowych) i przeznaczony do wezwania pomocy przez pacjentów.

• DANE TECHNICZNE:

Łącznik przyciskowy niestabilny zwierny osprzętu elektrycznego oznakowany piktogramem żelowym WEZWANIE z ramką pojedynczą.
Gabaryty: 90x90mm, wersja wtyrkowa do puszki instalacyjnej fi. 60 mm.
Kolor: BIAŁY.

• MONTAŻ:

W pomieszczeniach pobytu dziennego, dodatkowo (oprócz łączników pociągowych) w sanitariatach. Dołączany do panelu PKAS.
Urządzenie w wersji **WTYRKOWEJ** - wypust instalacji w puszcze wtyrkowej fi.60mm.

• FUNKCJONOWANIE:

Przycisk przywoławczy umożliwia pacjentom wezwanie pomocy przez chwilowe jego wciśnięcie. Wezwanie zostaje zarejestrowane w panelu PKAS - sygnalizowane jest świeceniem lampy oraz w centralce w dyżurce personelu.



www.callnet.online

CALLNET - wariant ALARMOWY

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią **GWARANCJĄ**.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.



Gniazdo manipulatora RJ14.



- **ZASTOSOWANIE:**

Gniazda manipulatorów RJ14 instalowane są w salach chorych przy łóżkach i przeznaczone dla manipulatorów przywoławczych do wezwania pomocy przez pacjentów.

- **DANE TECHNICZNE:**

Gniazdo RJ14 typu 6p4c (moduł zaciskowy beznarzędziowy), z ramką pojedynczą.
Gabaryty: 90x90mm, wersja wtykowa do puszki instalacyjnej fi. 60 mm.
Kolor: BIAŁY.

- **MONTAŻ:**

W salach przy łóżkach, ok. 80-90 cm nad podłogą.
Dołączany do panelu PKAS.
Urządzenie w wersji **WTYKOWEJ** - wypust instalacji w puszcze wtykowej fi.60mm.

- **FUNKCJONOWANIE:**

Gniazdo manipulatora umożliwia jego podłączenie dla pacjentów, gdy wymagane jest aby źródło przywołania znajdowało się w zasięgu ręki pacjenta.

- **UWAGI:**

Zastosowanie innych gniazd RJ dla manipulatorów niż zalecane może spowodować niewłaściwe funkcjonowanie manipulatorów przywoławczych !



www.callnet.online

CALLNET - wariant ALARMOWY

Manipulator przywoławczy MP-W z przyciskiem wandaloodpornym i opcjonalnym wieszakiem ściennym

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią **GWARANCJĄ**.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymagania dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.



- **ZASTOSOWANIE:**

Manipulator przywoławczy MP-W instalowany jest w salach chorych przy łóżkach i przeznaczony jest do wezwania pomocy przez pacjentów.

- **DANE TECHNICZNE:**

Gabaryty: 98x50/28x16 mm
Obudowa z tworzywa ABS (kolor jasny szary) pokryta białą folią poliestrową, **WANDALOODPORNY mechaniczny przycisk niklowany WEZWANIE o bardzo wysokiej trwałości (ok. 1 mln zadziałań)**.
Przewód giętki ok. 2 m zakończony wtykiem RJ14 typu 6p4c.
Napięcie robocze: 12V DC.
Opcjonalnie wieszak ścienny.

- **MONTAŻ:**

W salach przy łóżkach - gniazdo RJ14 typu 6p4c osadzone ok. 30-40 cm nad podłogą - wypust instalacji w puszcze wtykowej fi.60mm (lub gniazdo z obudową natynkową).
Połączenie przewodowe z gniazda RJ14 do panelu PKAS.

- **FUNKCJONOWANIE:**

Manipulator przywoławczy MP-W umożliwia wezwanie pomocy pacjentom z sal chorych. Giętki przewód pozwala na umieszczenie urządzenia w zasięgu ręki chorego lub odwieszenie na wieszaku ściennym przy łóżku.
Chwilowe wciśnięcie przycisku WEZWANIE zostaje zarejestrowane w panelu PKAS i sygnalizowane jest świeceniem lampy nad drzwiami pomieszczenia oraz w centralce w dyżurce personelu.



www.callnet.online

CALLNET - wariant ALARMOWY

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są GWARANCJĄ do 5 lat.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.



Panel sygnalizacyjny CS22



• ZASTOSOWANIE:

Panel sygnalizacyjny przeznaczony jest do optycznej i akustycznej sygnalizacji wezwań od pacjentów oraz alarmów w dyżurkach pielęgniarskich.

• DANE TECHNICZNE:

Pojemność: do 22 pomieszczeń (sale, sale z sanitariatami, sanitariaty zbiorcze), możliwość sygnalizacji z dwóch sąsiednich pomieszczeń jedną diodą (redukcja numerów).

Diody świecące z polami na numery sal oraz diody funkcyjne ALARM, PRACA NOCNA i ZASILANIE.

Dwa sygnalizatory akustyczne przełączane wyłącznikiem PRACA NOCNA (tryb cichy).

Wyłącznik WYCISZENIA SYGNAŁU: do czasu skasowania wszystkich wezwań, centrala nie sygnalizuje ich akustycznie (również nowych wezwań, które nadeszły w trakcie).

Możliwość równoległego dołączenia drugiego panelu CS22.

Gabaryty: **290x215x40 mm**, obudowa natynkowa z tworzywa ABS pokryta folią klawiaturową.

Zasilanie: z zewnętrznego zasilacza stabilizowanego 12V/3A, BRAK wyłącznika zasilania urządzeń systemu (w celu uniemożliwienia kasowania wezwań w centrali, bez udania się na miejsce zdarzenia).

Polaryzacja aktywnego sygnału na wejściach: +12 V DC, brak opcji komputerowej rejestracji.

• MONTAŻ:

W dyżurce pielęgniarskiej obok biurka, na wysokości ok. 160-170 cm nad podłogą.

Indywidualne połączenia przewodowe do paneli PKAS.

Urządzenie w wersji **NATYNKOWEJ** - zalecane osadzenie puszki instalacyjnej wtynkowej fi. 60mm.

• FUNKCJONOWANIE:

Panel CS22 sygnalizuje zdarzenia w oddziale:

- optycznie: zapalenie diody obok właściwego numeru sali oraz w przypadku alarmu diody ALARM.

- akustycznie: dla wezwań i alarmów ciągły sygnał akustyczny, aż do skasowania wezwania lub wyciszenia.

Sygnalizacja alarmu blokuje czasowo sygnalizację wezwań od pacjentów.

• UWAGI:

Do panelu CS22 może zostać dołączony równolegle drugi taki sam panel, jeśli jest wymagana równoczesna sygnalizacja w dwóch dyżurkach pielęgniarskich.

Ze względu na dodatkową polaryzację aktywnych sygnałów wejściowych, centrala CS22 jest kompatybilna ze starszymi wersjami central: PS12/15/18/24 oraz PS24-CYF.



www.callnet.online

CALLNET - wariant ALARMOWY

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są GWARANCJĄ do 5 lat.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.



Panel sygnalizacyjny PS18



• ZASTOSOWANIE:

Panel sygnalizacyjny przeznaczony jest do optycznej i akustycznej sygnalizacji wezwań od pacjentów oraz alarmów w dyżurkach pielęgniarskich.

• DANE TECHNICZNE:

Pojemność: do 18 pomieszczeń (sale, sale z sanitariatami, sanitariaty zbiorcze), możliwość sygnalizacji z dwóch sąsiednich pomieszczeń jedną diodą (redukcja numerów).
Diody świecące z polami na numery sal oraz diody funkcyjne ALARM, WEZWANIE, PRACA NOCNA i ZASILANIE.
Dwa sygnalizatory akustyczne przełączane wyłącznikiem PRACA NOCNA (cichy).
Wyłącznik WYCISZENIA SYGNAŁU: do czasu skasowania wszystkich wezwań, centrala nie sygnalizuje ich akustycznie (również nowych wezwań, które nadeszły w trakcie).
Możliwość równoległego dołączenia drugiego panelu PS18.
Gabaryty: 270x200x48mm, obudowa natynkowa z tworzywa ABS pokryta folią klawiaturową.
Zasilanie: z zewnętrznego zasilacza stabilizowanego 12V/3A, BRAK wyłącznika zasilania urządzeń systemu (w celu uniemożliwienia kasowania wezwań w centrali, bez udania się na miejsce zdarzenia).

• MONTAŻ:

W dyżurce pielęgniarskiej obok biurka, na wysokości ok. 160-170 cm nad podłogą.
Indywidualne połączenia przewodowe do paneli PKAS.
Urządzenie w wersji **NATYNKOWEJ** - zalecane osadzenie puszkii instalacyjnej wtykowej fi. 60mm.

• FUNKCJONOWANIE:

Panel PS18 sygnalizuje zdarzenia w oddziale:
- optycznie: zapalenie diody obok właściwego numeru sali oraz diody WEZWANIE (lub ALARM).
- akustycznie: dla wezwań i alarmów ciągły sygnał akustyczny, aż do skasowania wezwania lub wyciszenia.
Sygnalizacja alarmu blokuje czasowo sygnalizację wezwań od pacjentów.

• UWAGI:

Do panelu PS18 może zostać dołączony równolegle drugi taki sam panel, jeśli jest wymagana równoczesna sygnalizacja w dwóch dyżurkach pielęgniarskich.



www.callnet.online