

CALLNET - wariant WC niepełnosprawni

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższą jakością podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymagania dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.

KARTY KATALOGOWE URZĄDZENIE SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO



www.callnet.online

CALLNET - wariant WC niepełnosprawni

Od 1967 roku jestem ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,


GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższą jakością podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymagania dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.

Przykład realizacji systemu przywoławczego

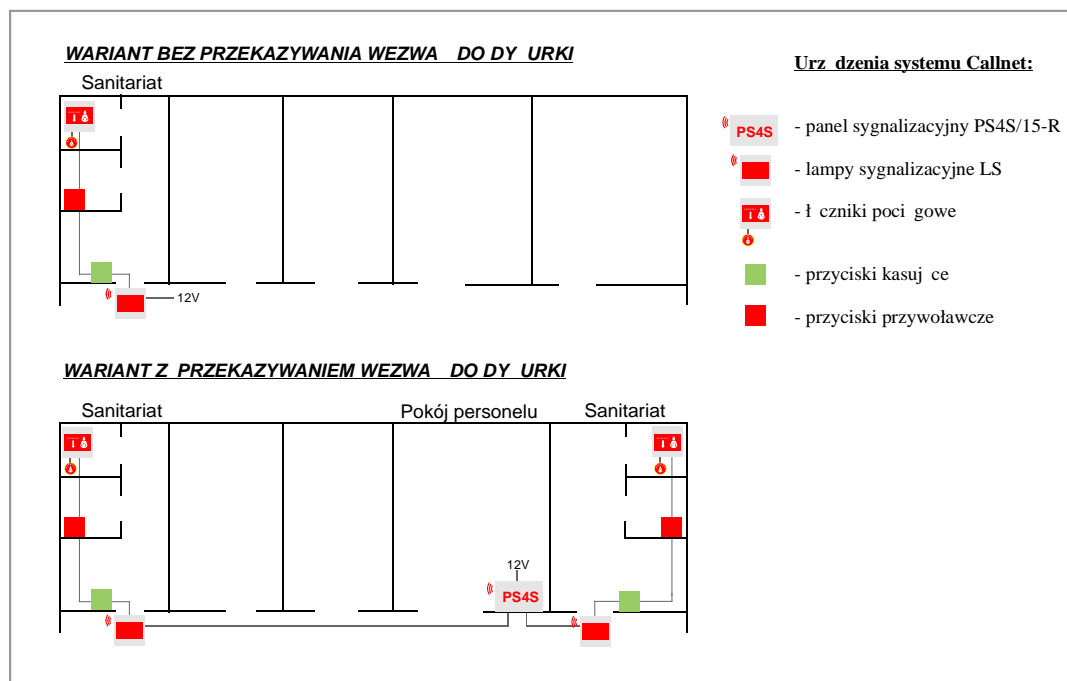

• CHARAKTERYSTYKA:

- możliwość wezwań pomocy z łazienki dla osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych, hotelach, obiektach medycznych,
- minimalna instalacja przewodowa.

• FUNKCJONOWANIE:

W najprostszym wariantcie, lampa sygnalizacyjna umieszczona nad drzwiami sanitariatu zasilana jest z lokalnego zasilacza (do szafki instalacyjnej lub na szynę DIN). W przypadku wciśnięcia przycisku przywoławczego oznaczonego „WEZWANIE” lub pociągnięcia sznurka czujnika pociągowego, wezwanie zostaje zarejestrowane w lampie sygnalizacyjnej LS i sygnalizowane jest wycieniem matrycy czerwonych diod wyciemnionych oraz sygnałem akustycznym. Po przybyciu personelu do łazienki, wezwanie zostaje skasowane przyciskiem kasującym.

Wezwania z kilku lamp sygnalizacyjnych mogą być przekazywane do dyżurnego personelu: do panelu PS4S (1..4 sanitariaty) lub CS15-R (do 15 sanitariatów).

Zastosowanie dyżurnego panelu CS15-R umożliwia wizualizację i ARCHIWIZACJĘ zdarzeń z 1..6 central na ekranie komputera.



www.callnet.online

CALLNET - wariant WC niepełnosprawni

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i uyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymagania dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.



Seria COMPACT - lampa sygnalizacyjna LS.



• ZASTOSOWANIE:

Lampa sygnalizacyjna LS z serii CALLNET-COMPACT instalowana jest nad drzwiami pomieszczenia w korytarzu i sygnalizuje optycznie oraz akustycznie (z możliwością wyłączenia) wezwania od pacjentów z sal chorych i sanitariatów.

• DANE TECHNICZNE:

Gabaryty: 80x80x25 mm, obudowa natynkowa z tworzywa ABS w kolorze białym, folia poliestrowa. Matryca czerwonych diod świecących, układ podtrzymujący wezwania. Sygnalizator akustyczny z możliwością wyłączenia sygnału. Napięcie robocze: 12V DC, pobór prądu przy sygnalizacji ok. 100 mA.

• MONTAŻ:

W korytarzu, 10-20 cm nad drzwiami pomieszczenia.
Połączenie przewodowe do centralki w dyspensarce pielęgniarskiej.
Urządzenie w wersji **NATYNKOWEJ** - zalecana puszka instalacyjna wtynkowa fi.60mm.

• FUNKCJONOWANIE:

Lampa LS rejestruje wezwania z dotknięciem do niej przycisków przywoławczych, manipulatorów, łazienek i czujników podłogowych i sygnalizuje w korytarzu oddziału światłem matrycy czerwonych diod świecących oraz sygnałem akustycznym (z możliwością wyłączenia). Jednocześnie informacja o wezwaniu przekazywana jest z lampy do centralki PS4S/CS15-R w dyspensarce personelu. Kasowanie wezwania następuje po wciśnięciu do dotkniętego do lampy przycisku kasującego WK.

• UWAGI:

Kilka lamp LS może zostać dotkniętych do jednej lampy grupowej, sygnalizującej wezwanie z grupy pomieszczenia.



CALLNET - wariant WC niepełnosprawni

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższą jakością z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymagania dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.

Seria COMPACT - ł cznik pociągowy ŁP



- **ZASTOSOWANIE:**

Natynkowy ł cznik pociągowy ŁP z serii CALLNET-COMPACT instalowany jest wewnątrz sanitariatów i przeznaczony jest do wezwania pomocy przez pacjentów (także w przypadku upadku na podłogę).

- **DANE TECHNICZNE:**

Gabaryty: 80x80x25 mm, obudowa natynkowa z tworzywa ABS w kolorze białym, folia poliesterowa. Brelok w kolorze czerwonym z piktogramem czerwonym, sznur ok.185 cm. Dodatkowa naklejka czerwona "WEZWANIE" na glazurę.

- **MONTAŻ:**

W sanitariatach ok. 200-220 cm nad podłogę.
Dołączony do lampy LS.
Urządzenie w wersji **NATYNKOWEJ** - zalecana puszką instalacyjną wtykowa fi.60mm.

- **FUNKCJONOWANIE:**

Ł cznik pociągowy jest rodzajem wezwania dla pacjentów przebywających w sanitariatach, umożliwiając im wezwanie pomocy również w przypadkach upadku na podłogę.
Pociąganie sznura z brelokiem oznakowanym piktogramem WEZWANIE, aktywuje wezwanie zarejestrowane w lampie sygnalizacyjnej LS - sygnalizowane jest włączeniem lampy nad drzwiami sanitariatu oraz w centralce w dyrekcji personelu.

- **UWAGI:**

Ł czniki pociągowe nie mogą być montowane w obrębie kabin natryskowych oraz bezpośrednio nad wannami ze względu na niebezpieczeństwo zalania urządzenia wodą.



CALLNET - wariant WC niepełnosprawni

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymagania dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.

Przycisk przywoławczy WP



• ZASTOSOWANIE:

Przycisk przywoławczy WP instalowany jest w salach chorych przy łóżkach oraz sanitariatach i przeznaczony jest do wezwania pomocy przez pacjentów.

• DANE TECHNICZNE:

Łącznik przyciskowy niestabilny zwierny osprzętu elektrycznego oznakowany piktogramem słowem WEZWANIE z ramką pojedynczą.
Gabaryty: 90x90mm, wersja wtyrkowa do puszczy instalacyjnej fi. 60 mm.
Kolor: BIAŁY.

• MONTAŻ :

W salach przy łóżkach oraz sanitariatach, ok. 90-100 cm nad podłogą, w zasięgu ręki pacjenta.
Dołączony do lampy LS.
Urządzenie w wersji **WTYRKOWEJ** - wypust instalacji w puszczy wtyrkowej fi.60mm.

• FUNKCJONOWANIE:

Przycisk przywoławczy umożliwia pacjentom wezwanie pomocy przez chwilowe jego wciśnięcie. Wezwanie zostaje zarejestrowane w lampie sygnalizacyjnej LS - sygnalizowane jest świeceniem lampy oraz w centralce w dyrekcji personelu.



CALLNET - wariant WC niepełnosprawni

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymagania dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.

Przycisk kasowy cv WK



• ZASTOSOWANIE:

Przycisk kasowy WK instalowany jest wewnątrz pomieszczenia przy drzwiach wejściowych i przeznaczony jest do kasowania wezwania od pacjentów przez personel.

• DANE TECHNICZNE:

Łącznik przyciskowy niestabilny zwierny osprzętu elektrycznego oznakowany piktogramem słowem KASOWANIE z ramką pojedynczą.
Gabaryty: 90x90mm, wersja wtykowa do puszek instalacyjnych fi. 60 mm.
Kolor: BIAŁY.

• MONTAŻ :

W salach i sanitariatach przy drzwiach wejściowych wewnątrz pomieszczenia, ok. 130-150 cm nad podłogą.
Dołączony do lampy LS.
Urządzenie w wersji **WTYKOWEJ** - wypust instalacji w puszcze wtykowej fi.60mm.

• FUNKCJONOWANIE:

Przycisk kasowy umożliwia pielęgniarkę skasowanie wezwania od pacjenta po wejściu do pomieszczenia.



CALLNET - wariant WC niepełnosprawni

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymagania dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.

Przyciski przywoławcze i kasujące WPK



• ZASTOSOWANIE:

Przyciski przywoławcze i kasujące WPK instalowane są wewnątrz pomieszczeń przy drzwiach wejściowych i przeznaczone są zarówno do wezwania pomocy przez pacjentów, jak i kasowania wezwania przez personel.

• DANE TECHNICZNE:

Łączniki przyciskowe niestabilne zwierne osprzętu elektrycznego w ramce podwójnej poziomej, oznakowane piktogramami kolorowymi KASOWANIE i WEZWANIE.

Gabaryty: 162x90mm, wersja wtykowa do DWÓCH puszek instalacyjnych zespolonych fi.60mm
Kolor: BIAŁY.

• MONTAŻ:

W salach, sanitariatach, pokojach pobytu dziennego przy drzwiach wejściowych wewnątrz pomieszczenia, ok. 130-150 cm nad podłogę.

Dołączony do lampy LS.

Urządzenie w wersji **WTYKOWEJ** - wypust instalacji w DWÓCH puszkach wtykowych zespolonych fi. 60mm (dla typowego osprzętu elektrycznego w podwójnej ramce poziomej).

• FUNKCJONOWANIE:

Przycisk kasujący umożliwia personelowi skasowanie wezwania od pacjenta po wejściu do pomieszczenia. Przycisk przywoławczy umożliwia pacjentom wezwanie pomocy przez chwilowe jego wciśnięcie.

Wezwanie zostaje zarejestrowane w lampie sygnalizacyjnej LS-PA - sygnalizowane jest wyciekiem lampy oraz w centralce w dyskurse personelu.



www.callnet.online

CALLNET - wariant WC niepełnosprawni

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższą jakością podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymagania dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.

Seria COMPACT - panel sygnalizacyjny PS4S



• ZASTOSOWANIE:

Panel sygnalizacyjny PS4S z serii CALLNET-COMPACT przeznaczony jest do optycznej i akustycznej sygnalizacji wezwań od osób niepełnosprawnych w dyżurkach personelu.

• DANE TECHNICZNE:

Gabaryty: 120x80x25mm, obudowa natynkowa z tworzywa ABS w kolorze białym, folia poliestrowa.
Pojemność: 4 sanitariaty, diody świecące z polami na opis numerów sanitariatów.
Sygnalizator akustyczny, wyłacznik sygnału akustycznego wraz z diodą sygnalizacyjną.
Napięcie robocze: 12V DC z zewnętrznego zasilacza STABILIZOWANEGO.

• MONTAŻ:

W dyżurce personelu obok biurka, na wysokości ok. 120-160 cm nad podłogą.
Indywidualne połączenia przewodowe z lampami sygnalizacyjnymi LS.
Urządzenie w wersji **NATYNKOWEJ**, zalecana puszka instalacyjna fi. 60mm.

• FUNKCJONOWANIE:

Panel PS4S sygnalizuje wezwania:
- optycznie (zawsze): zapalenie diody obok właściwego numeru sanitariatu,
- akustycznie (tylko przy włączonym sygnalizatorze): ciągły sygnał akustyczny.



www.callnet.online

CALLNET - wariant WC niepełnosprawni

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i utylczości publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższą jakością z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymagania dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.

Panel sygnalizacyjny CS15-R z opcją komputerowej rejestracji zdarzeń



• ZASTOSOWANIE:

Panel sygnalizacyjny przeznaczony jest do optycznej i akustycznej sygnalizacji wezwania od osób niepełnosprawnych w dyżurkach personelu.

• DANE TECHNICZNE:

Pojemność: **do 15 sanitariatów**, możliwość sygnalizacji z dwóch siedlisk pomieszczeń (redukcja numerów).

Gabaryty: **290x215x40 mm**, obudowa natynkowa z tworzywa ABS pokryta folią klawiatury z diodami LED SMD.

Aktywny poziom wejścia: MASA (minus) - bezpośrednia współpraca z koncentratorami magistralowymi KM.

Zasilanie: z zewnętrznego zasilacza stabilizowanego DC 12V/1..3A, BRAK wyłącznika zasilania urządzenia systemu (w celu uniemożliwienia kasowania wezwania w centrali, bez udania się na miejsce zdarzenia).

Dwa sygnalizatory akustyczne przełączane wyłącznikiem GŁOŚNY/CICHY (praca nocna).

Możliwość dołączenia czterech paneli sygnalizacji dodatkowej PS4S oraz równoległe drugiego panelu CS15-R.

Przełącznik WYCIŚNIENIA SYGNAŁU w pokrywie: do czasu skasowania wszystkich wezwań, centrala nie sygnalizuje ich akustycznie (również nowych wezwań, które nadeszły w trakcie).

OPCJONALNIE - zewnętrzny przycisk wyciszenia sygnału w wygodnym dla personelu miejscu (dzwonek).

• MONTAŻ:

W dyżurce pielęgniarskiej obok biurka, na wysokości ok. 160-170 cm nad podłogą.

Indywidualne połączenia przewodowe do lamp sygnalizacyjnych LS.

Urządzenie w wersji **NATYNKOWEJ** - zalecana puszka instalacyjna wtykowa fi.60mm.

• FUNKCJONOWANIE:

Panel CS15-R sygnalizuje zdarzenia:

- optycznie: zapalenie diody obok właściwego numeru sanitariatu,

- akustycznie: ciągły sygnał akustyczny.

• UWAGI:

Ze względu na aktywny poziom sygnału na wejściu MASA (minus), panel **CS15-R** nie jest kompatybilny z wycofanymi centralami PS12, 24 i 18 - może współpracować wyłącznie z nową generacją lamp LS.



www.callnet.online

CALLNET - wariant WC niepełnosprawni

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,


GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższą jakością podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymagania dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.

Przykład komputerowej rejestracji zdarzeń z centralami PS15-R

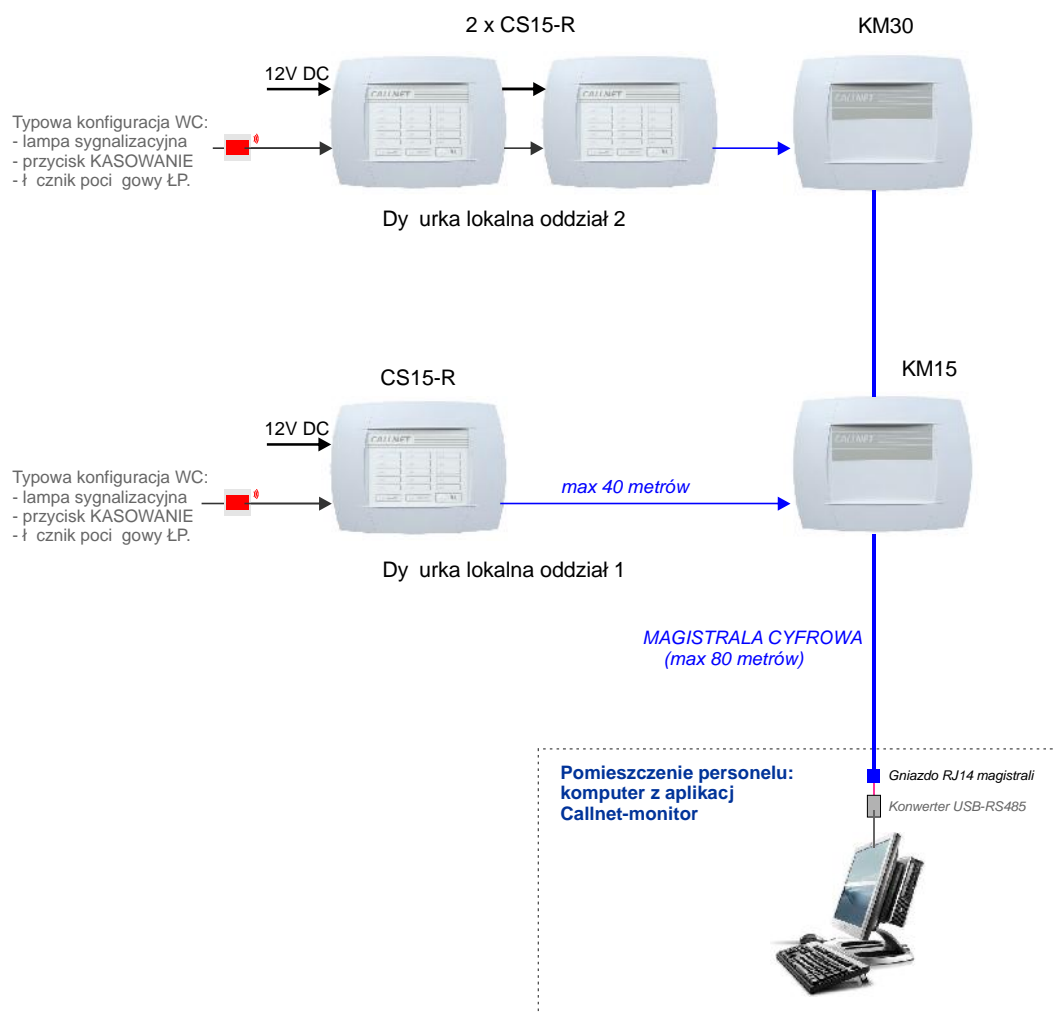

UWAGI:

- komputerowa rejestracja możliwa jest wyłącznie w wariantach z panelami CS15-R.
- aplikacja Callnet-Monitor umożliwia dołączenie 1..6 paneli CS15-R do koncentratorów magistralowych KM.

