

Od 1967 roku jesteśmy
ekspertem w dziedzinie
systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów
przywoławczych dla
obiektów medycznych
i użyteczności publicznej
(WC dla niepełnosprawnych),
domów pomocy społecznej,
sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane
są z najwyższej jakości
podzespołów i obudów z
tworzywa ABS - objęte są
3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia
systemu Callnet spełniają
wymogi dyrektywy EMC i
oznakowane są europejskim
znakiem CE.

KARTY KATALOGOWE URZĄDZEŃ SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO w wariancie OIOM z modułami MMPK.



CALLNET - wariant OIOM

Przykład realizacji wariantu OIOM z modułami MMPK

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET


Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.

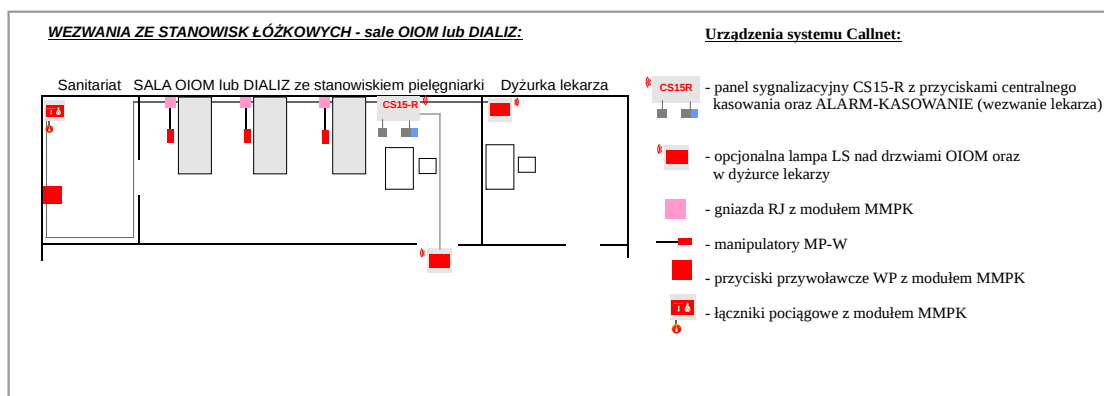

CHARAKTERYSTYKA:

- możliwość bezpośredniego dołączania stanowisk łóżkowych do central w salach OIOM lub dializ - identyfikacja numeru łóżka przy wezwaniu,
- obsługa sanitariatów przy OIOM,
- panel sygnalizacyjny CS15-R z przyciskiem centralnego kasowania,
- opcja - lampa sygnalizacyjna nad drzwiami sali OIOM (sygnalizacja wezwań),
- opcja - przyciski ALARM-KASOWANIE i lampa w dyżurce lekarzy (alarmowe wezwanie lekarza przez pielęgniarkę),
- opcja komputerowej rejestracji wezwań z panelu CS15-R.

FUNKCJONOWANIE:

Chwilowe zwarcie przycisków przywoławczych, manipulatorów lub łączników pociągowych zostaje zarejestrowane w modułach MMPK i przekazywana jest informacja o zgłoszeniu do dyżurki pielęgniarskiej: zaświecona w panelu dioda LED przy numerze łóżka (sanitariatu) oraz sygnał akustyczny. Opcjonalnie zapalana jest lampa sygnalizacyjna w korytarzu nad drzwiami OIOM (może być też dołączona do centrali w głównej dyżurce oddziału). Kasowanie wezwania następuje przyciskiem kasującym umieszczonym przy centrali. Opcjonalnie można zainstalować przy centralce przyciski ALARM-KASOWANIE oraz lampę LS w dyżurce lekarzy, w celu wezwania lekarza przez pielęgniarkę w sytuacji alarmowej.



www.callnet.online

CALLNET - variant OIOM

Mini-moduł przywoławczo kasujący MMPK.

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.



• ZASTOSOWANIE:

Mini-moduł przywoławczo-kasujący zawiera układ rejestrujący wezwania i umożliwia realizację wariantów systemu CALLNET bez lamp sygnalizacyjnych. Moduł umieszcza się pod przyciskiem przywoławczym, gniazdem RJ manipulatora lub pod łącznikiem pociągowym w puszcze instalacyjnej i do wejścia doprowadza się źródła wezwań, a wyjście dołącza się do centrali CS15-R. Moduł umożliwia bezpośrednie (bez pośrednictwa lamp sygnalizacyjnych) dołączenie stanowisk łóżkowych w salach OIOM lub dializ oraz sanitariatów.

• DANE TECHNICZNE:

Gabaryty: 36x20x14 mm, kabel ok. 10 cm do kasownika.
Wejście wezwań z przycisków lub łączników pociągowych, wiązka kablowa do przycisku kasowania
Wyjście sygnalizacyjne: z polaryzacją MINUS (MASA) do centrali CS15-R.
Napięcie robocze: 12V DC z centrali.

• MONTAŻ:

Moduł umieszcza się w puszcze instalacyjnej fi. 60 pod łącznikiem pociągowym, gniazdem RJ, przyciskiem.

• FUNKCJONOWANIE:

Chwilowe zwarcie przycisków manipulatorów, przycisków przywoławczych lub łączników pociągowych zostaje zarejestrowane w module, do czasu skasowania przyciskiem centralnego kasowania przy centrali. Jednocześnie do panelu CS15-R w dyżurce pielęgnarskiej przekazywana jest informacja o zgłoszeniu - zaświecona dioda LED przy numerze łóżka (sanitariatu) oraz sygnał akustyczny.



www.callnet.online

CALLNET - variant OIOM

Od 1967 roku jesteśmy
ekspertem w dziedzinie
systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów
przywoławczych dla
obiektów medycznych
i użyteczności publicznej
(WC dla niepełnosprawnych),
domów pomocy społecznej,
sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane
są z najwyższej jakości
podzespołów i obudów z
tworzywa ABS - objęte są
3-letnią **GWARANCJĄ**.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia
systemu Callnet spełniają
wymogi dyrektywy EMC i
oznakowane są europejskim
znakiem CE.



Gniazdo manipulatora RJ14



- **ZASTOSOWANIE:**

Gniazda manipulatorów RJ14 instalowane są w salach OIOM przy łóżkach i przeznaczone dla manipulatorów przywoławczych do wezwania pomocy przez pacjentów.

- **DANE TECHNICZNE:**

Gniazdo RJ14 typu 6p4c (moduł zaciskowy beznarzędziowy), z ramką pojedynczą.
Gabaryty: 90x90mm, wersja wtynkowa do puszki instalacyjnej fi. 60 mm.
Kolor: BIAŁY.

- **MONTAŻ:**

W salach przy łóżkach, ok. 80-90 cm nad podłogą.
Dołączany do modułu MMPK.
Urządzenie w wersji **WTYNKOWEJ** - wypust instalacji w puszcze wtynkowej fi.60mm.
Dostępna jest również wersja natynkowa gniazda z innej serii osprzętu.

- **FUNKCJONOWANIE:**

Gniazdo manipulatora umożliwia jego podłączenie dla pacjentów, gdy wymagane jest aby źródło przywołania znajdowało się w zasięgu ręki pacjenta.

- **UWAGI:**

Zastosowanie innych gniazd RJ dla manipulatorów niż zalecane może spowodować niewłaściwe funkcjonowanie manipulatorów przywoławczych !



www.callnet.online

CALLNET - variant OIOM

Manipulator przywoławczy MP-W z przyciskiem wandaloodpornym i opcjonalnym wieszakiem ściennym

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią **GWARANCJĄ**.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.



- **ZASTOSOWANIE:**

Manipulator przywoławczy MP-W instalowany jest w salach chorych przy łóżkach i przeznaczony jest do wezwania pomocy przez pacjentów.

- **DANE TECHNICZNE:**

Gabaryty: 98x50/28x16 mm
Obudowa z tworzywa ABS (kolor jasny szary) pokryta białą folią poliestrową, **WANDALOODPORNY mechaniczny przycisk niklowany WEZWANIE o bardzo wysokiej trwałości (ok. 1 mln zadziałań)**.
Przewód giętki ok. 2 m zakończony wtykiem RJ14 typu 6p4c.
Napięcie robocze: 12V DC.
Opcjonalnie wieszak ścienny.

- **MONTAŻ:**

W salach przy łóżkach - gniazdo RJ14 typu 6p4c osadzone ok. 30-40 cm nad podłogą
- wypust instalacji w puszcze wtykowej fi.60mm (lub gniazdo z obudową natynkową).
Połączenie przewodowe z gniazda RJ14 do modułu MMPK.

- **FUNKCJONOWANIE:**

Manipulator przywoławczy MP-W umożliwia wezwanie pomocy pacjentom z sal chorych. Giętki przewód pozwala na umieszczenie urządzenia w zasięgu ręki chorego lub odwieszenie na wieszaku ściennym przy łóżku.
Chwilowe wciśnięcie przycisku WEZWANIE zostaje zarejestrowane w module MMPK i sygnalizowane jest w centralce w dyżurce personelu.



www.callnet.online

CALLNET - wariant OIOM

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.



Przycisk przywoławczy WP



- **ZASTOSOWANIE:**

Przycisk przywoławczy WP instalowany jest opcjonalnie w sanitariatach (dodatkowo poza ŁP) i przeznaczony do wezwania pomocy przez pacjentów.

- **DANE TECHNICZNE:**

Łącznik przyciskowy niestabilny zwierny osprzętu elektrycznego oznakowany piktogramem żelowym WEZWANIE z ramką pojedynczą.
Gabaryty: 90x90mm, wersja wtynkowa do puszek instalacyjnych fi. 60 mm.
Kolor: BIAŁY.

- **MONTAŻ:**

W sanitariatach, ok. 80-90 cm nad podłogą, w zasięgu ręki pacjenta.
Dołączany do modułu MMPK.
Urządzenie w wersji **WTYNKOWEJ** - wypust instalacji w puszcze wtynkowej fi. 60mm.
Dostępna jest również wersja natynkowa z innej serii osprzętu.

- **FUNKCJONOWANIE:**

Przycisk przywoławczy umożliwia pacjentom wezwanie pomocy przez chwilowe jego wciśnięcie. Wezwanie zostaje zarejestrowane w module MMPK i sygnalizowane jest w centralce w dyżurce personelu.



www.callnet.online

CALLNET - variant OIOM

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.



Seria COMPACT - łącznik pociągowy ŁP



• ZASTOSOWANIE:

Natynkowy łącznik pociągowy ŁP z serii CALLNET-COMPACT instalowany jest wewnątrz sanitariatów i przeznaczony jest do wezwania pomocy przez pacjentów (także w przypadku upadku na podłogę).

• DANE TECHNICZNE:

Gabaryty: 80x80x25 mm, obudowa natynkowa z tworzywa ABS w kolorze białym, folia poliestrowa. Brelok w kolorze czerwonym z piktogramem żelowym, sznur ok.185 cm. Dodatkowa naklejka żelowa "WEZWANIE" na glazurę.

• MONTAŻ:

W sanitariatach ok. 200-220 cm nad podłogą.

Dołączany do modułu MMPK.

Urządzenie w wersji **NATYNKOWEJ** - WYMAGANA puszka instalacyjna wtykowa fi.60mm, w celu umieszczenia mini-modułu MMPK !

• FUNKCJONOWANIE:

Łącznik pociągowy jest źródłem wezwania dla pacjentów przebywających w sanitariatach, umożliwiając im wezwanie pomocy również w przypadkach upadku na podłogę.

Pociągnięcie sznura z brelokiem oznakowanym piktogramem WEZWANIE, aktywuje wezwanie zarejestrowane w module MMPK i sygnalizowane jest w centralce w dyżurce personelu.



www.callnet.online

CALLNET - wariant OIOM

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.

Panel sygnalizacyjny CS15-R z opcją komputerowej rejestracji zdarzeń



• ZASTOSOWANIE:

Panel sygnalizacyjny CS15-R przeznaczony jest do optycznej i akustycznej sygnalizacji wezwań od pacjentów w dyżurce pielęgniarskiej OIOM.

• DANE TECHNICZNE:

Pojemność: do 15 stanowisk łóżkowych, WC.
Gabaryty: **290x215x40 mm**, obudowa natynkowa z tworzywa ABS pokryta folią klawiaturową z diodami LED SMD.
Aktywny poziomy wejście: MINUS (MASA).
OPCJA komputerowej rejestracji wezwań z panelu CS15-R (opis w dokumentacji REJESTRACJA-PC).
Zasilanie: z zewnętrznego zasilacza stabilizowanego DC 12V/1..3A, BRAK wyłącznika zasilania urządzeń systemu.
Dwa sygnalizatory akustyczne przełączane wyłącznikiem GŁOŚNY/CICHY (praca nocna).
Możliwość dołączenia paneli sygnalizacji dodatkowej PS4S oraz równolegle drugiego panelu CS15-R.
Przełącznik WYCISZENIA SYGNAŁU w pokrywie: do czasu skasowania wszystkich wezwań, centrala nie sygnalizuje ich akustycznie (również nowych wezwań, które nadeszły w trakcie).

• MONTAŻ:

W dyżurce pielęgniarskiej obok biurka, na wysokości ok. 160-170 cm nad podłogą.
Indywidualne połączenia przewodowe do modułów MMPK.
Urządzenie w wersji **NATYNKOWEJ** - zalecana puszka instalacyjna wtykowa fi.60mm.

• FUNKCJONOWANIE:

Panel CS15-R sygnalizuje zdarzenia w oddziale:
- optycznie: zapalenie diody obok właściwego numeru łóżka (sanitariatu)
- akustycznie: ciągły sygnał akustyczny.
KASOWANIE następuje po chwilowym odłączeniu zasilania wyłącznikiem CENTRALNEGO KASOWANIA (gaśnie na chwilę zielona dioda kontrolna ZASILANIE w pokrywie panelu).



www.callnet.online

CALLNET - wariant OIOM

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.



Przycisk **rozwierny** CENTRALNE KASOWANIE przy panelu sygnalizacyjnym CS15-R.



- **ZASTOSOWANIE:**

Przycisk ROZWIERNY centralnego kasowania umieszczony przy centrali CS15-R w dyżurce OIOM pozwala na chwilowe odłączenie zasilania i kasuje wszystkie zarejestrowane wezwania.

- **DANE TECHNICZNE:**

Łącznik przyciskowy **niestabilny ROZWIERNY** osprzętu elektrycznego oznakowany piktogramem żelowym KASOWANIE w ramce pojedynczej.
Gabaryty: 90x90mm, wersja wtynkowa do puszek instalacyjnej fi. 60 mm.
Kolor: BIAŁY.

- **MONTAŻ:**

W sali OIOM przy panelu CS15-R na posterunku pielęgniarskim.
Urządzenie wyłącznie w wersji WTYNKOWEJ - wypust instalacji w puszkach wtynkowych fi.60mm.

- **FUNKCJONOWANIE:**

Przycisk centralnego kasowania umożliwia pielęgniarkę skasowanie wszystkich wezwań od pacjentów w sali IOM.

- **UWAGI:**

Przycisk ROZWIERNY centralnego kasowania jest z innej serii osprzętu niż standardowe przyciski kasowania i wezwania i wyłącznie w wersji wtynkowej.



www.callnet.online

CALLNET - variant OIOM

OPCJA - przyciski ALARM-KASOWANIE dla wezwania lekarza dyżurnego.

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.



- **ZASTOSOWANIE:**

Przycisk ALARM umieszczony przy centrali CS15-R w dyżurce OIOM pozwala na wezwanie lekarza dyżurnego przez pielęgniarkę w nagłych wypadkach. Kasowanie wezwania po jego przybyciu przyciskiem KASOWANIE.

- **DANE TECHNICZNE:**

Łączniki przyciskowe niestabilne zwiernie osprzętu elektrycznego w ramce podwójnej poziomej, oznakowane piktogramami żelowymi.
Gabaryty: 162x90mm, wersja wtykowa do dwóch puszek instalacyjnych fi. 60 mm systemu ramkowego.
Kolor: BIAŁY.

- **MONTAŻ:**

W sali OIOM przy panelu CS15-R na posterunku pielęgniarskim.
Urządzenie w wersji **WTYNKOWEJ** - wypust instalacji w dwóch puszkach wtykowych fi.60mm.
Dostępna jest również wersja natynkowa z innej serii osprzętu.

- **FUNKCJONOWANIE:**

Przycisk ALARM pozwala na wezwanie lekarza w nagłych wypadkach - w dyżurce lekarskiej włączona zostaje sygnalizacja optyczna i akustyczna lampą LS, a funkcja alarmu zostaje potwierdzona w centrali CS15-R niebieską diodą ALARM.
Po przybyciu lekarza, wezwanie zostaje skasowane przyciskiem KASOWANIE.



www.callnet.online

CALLNET - variant OIOM

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.



OPCJA - lampa sygnalizacyjna LS.



• ZASTOSOWANIE:

Lampa sygnalizacyjna LS może zostać zainstalowana w korytarzu oddziału nad drzwiami OIOM jako dodatkowy sygnalizator i sygnalizuje optycznie oraz akustycznie (opcjonalnie) wszystkie wezwania od pacjentów. W dyżurkach lekarskich lampa LS sygnalizuje wyłącznie ALARM - wezwania lekarza w nagłych przypadkach przez pielęgniarkę z sali OIOM, za pomocą przycisków ALARM-KASOWANIE. W obu przypadkach instalowanych może być równolegle kilka lamp sygnalizacyjnych (kilka dyżurek, kotrytarz).

• DANE TECHNICZNE:

Gabaryty: 80x80x25 mm, obudowa natynkowa z tworzywa ABS w kolorze białym, folia poliestrowa. Matryca czerwonych diod świecących, układ podtrzymujący wezwania. Sygnalizator akustyczny z możliwością wyłączenia sygnału. Napięcie robocze: 12V DC, pobór prądu przy sygnalizacji ok.100 mA.

• MONTAŻ:

W korytarzu, 10-20 cm nad drzwiami pomieszczeń lub w dyżurce lekarskiej wewnątrz nad drzwiami. Połączenie przewodowe do centrali CS15-R w dyżurce OIOM. Urządzenie w wersji **NATYNKOWEJ** - zalecana puszka instalacyjna wtykowa fi.60mm.

• FUNKCJONOWANIE:

Zainstalowana nad drzwiami sali IOM w korytarzu lampa LS dodatkowo sygnalizuje wszystkie wezwania zarejestrowane w panelu CS15-R. W dyżurce lekarzy lampa sygnalizuje ALARM - wezwania lekarza przez pielęgniarkę w nagłych wypadkach.



www.callnet.online