

CALLNET - wariant STANDARD

Od 1967 roku jesteśmy
ekspertem w dziedzinie
systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów
przywoławczych dla
obiektów medycznych
i użyteczności publicznej
(WC dla niepełnosprawnych),
domów pomocy społecznej,
sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane
są z najwyższej jakości
podzespołów i obudów z
tworzywa ABS - objęte są
3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia
systemu Callnet spełniają
wymogi dyrektywy EMC i
oznakowane są europejskim
znakiem CE.

KARTY KATALOGOWE URZĄDZEŃ SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO



www.callnet.online

CALLNET - wariant STANDARD

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA


Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.



Przykład realizacji systemu przywoławczego

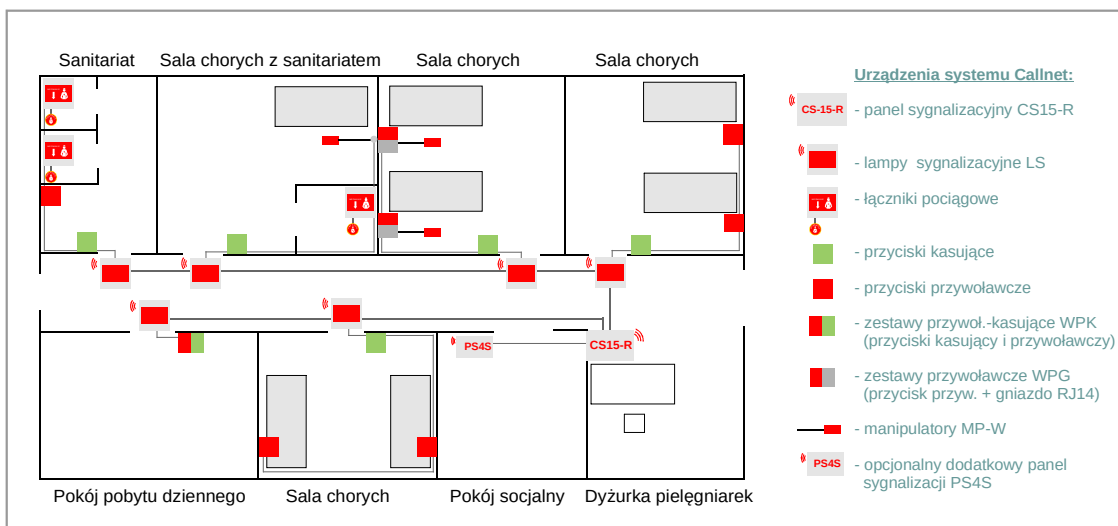

CHARAKTERYSTYKA:

- lamp sygnalizacyjne LED z opcjonalnym sygnałem akustycznym (układ rejestracji i kasowania wezwań),
- przyciski kasujące w salach i sanitariatach na bazie typowego osprzętu elektrycznego,
- przyciski przywoławcze przy łóżkach pacjentów w salach (lub manipulatory),
- łączniki pociągowe (lub przyciski przywoławcze) w sanitariatach,
- 15-numerowa centrala CS15-R z opcją komputerowej rejestracji zdarzeń w dyżurce personelu,
- opcjonalnie sygnalizacyjne w dodatkowych pomieszczeniach personelu,
- minimalna instalacja przewodowa (również w wersji natynkowej).

FUNKCJONOWANIE:

System Callnet w wariantcie STANDARD umożliwia pacjentom wezwanie pomocy z sal (przyciski przywoławcze lub manipulatory), sanitariatów (łączniki pociągowe lub przyciski przywoławcze) oraz pomieszczeń pobytu dziennego. Sygnał wezwania zostaje podtrzymany w naddrzwiowej lampie sygnalizacyjnej LS i zapalona zostaje czerwona matryca diod świecących. Opcjonalnie lampka emituje sygnał akustyczny nie tylko ułatwiający personelowi lokalizację miejsca wezwania, ale również potwierdzający pacjentom w sali jego zarejestrowanie.

Informacja o wezwaniu zostaje przekazana z lampy do centrali CS15-R (CS22) w dyżurce pielęgniarek, gdzie włączona zostaje sygnalizacja akustyczna i optyczna (numer pomieszczenia). Możliwe jest również przekazywanie informacji do dodatkowych pomieszczeń personelu za pomocą paneli PS4S (bez identyfikacji numeru pomieszczenia). Po przybyciu pielęgniarki do pomieszczenia, wezwanie zostaje skasowane przyciskiem kasującym.

Zastosowanie w dyżurce paneli CS15-R umożliwia wizualizację i ARCHIWIZACJĘ zdarzeń z 1..6 central na ekranie komputera.



www.callnet.online

CALLNET - wariant STANDARD

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.



Seria COMPACT - lampa sygnalizacyjna LS.



• ZASTOSOWANIE:

Lampa sygnalizacyjna LS z serii CALLNET-COMPACT instalowana jest nad drzwiami pomieszczeń w korytarzu i sygnalizuje optycznie oraz akustycznie (z możliwością wyłączenia) wezwania od pacjentów z sal chorych i sanitariatów.

• DANE TECHNICZNE:

Gabaryty: 80x80x25 mm, obudowa natynkowa z tworzywa ABS w kolorze białym, folia poliestrowa. Matryca czerwonych diod świecących, układ podtrzymujący wezwania. Sygnalizator akustyczny z możliwością wyłączenia sygnału. Napięcie robocze: 12V DC, pobór prądu przy sygnalizacji ok.100 mA.

• MONTAŻ:

W korytarzu, 10-20 cm nad drzwiami pomieszczeń. Połączenie przewodowe do centrali w dyżurce pielęgniarskiej. Urządzenie w wersji **NATYNKOWEJ** - zalecana puszką instalacyjną wtykowa fi.60mm.

• FUNKCJONOWANIE:

Lampa LS rejestruje wezwania z dołączonych do niej przycisków przywoławczych, manipulatorów, łączników pociągowych i sygnalizuje w korytarzu oddziału świeceniem matrycy czerwonych diod świecących oraz sygnałem akustycznym (z możliwością wyłączenia). Jednocześnie, informacja o wezwaniu przekazywana jest z lampy do centrali CS15-R w dyżurce personelu. Kasowanie wezwania następuje po wciśnięciu dołączonego do lampy przycisku kasującego WK.

• UWAGI:

Kilka lamp LS może zostać dołączonych do jednej lampy grupowej, sygnalizującej wezwanie z grupy pomieszczeń.



www.callnet.online

CALLNET - wariant STANDARD

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości tworzywa ABS - objęte są 3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.



Seria COMPACT - łącznik pociągowy ŁP



- **ZASTOSOWANIE:**

Natynkowy łącznik pociągowy ŁP z serii CALLNET-COMPACT instalowany jest wewnątrz sanitariatów i przeznaczony jest do wezwania pomocy przez pacjentów (także w przypadku upadku na podłogę).

- **DANE TECHNICZNE:**

Gabaryty: 80x80x25 mm, obudowa natynkowa z tworzywa ABS w kolorze białym, folia poliestrowa. Brelok w kolorze czerwonym z piktogramem żelowym, sznur ok.185 cm. Dodatkowa naklejka żelowa "WEZWANIE" na glazurę.

- **MONTAŻ:**

W sanitariatach ok. 200-220 cm nad podłogą.
Dołączany do lampy LS.
Urządzenie w wersji **NATYNKOWEJ** - zalecana puszka instalacyjna wtynkowa fi.60mm.

- **FUNKCJONOWANIE:**

Łącznik pociągowy jest źródłem wezwania dla pacjentów przebywających w sanitariatach, umożliwiając im wezwanie pomocy również w przypadkach upadku na podłogę. Pociągnięcie sznura z brelokiem oznakowanym piktogramem WEZWANIE, aktywuje wezwanie zarejestrowane w lampie sygnalizacyjnej LS - sygnalizowane jest świeceniem lampy nad drzwiami sanitariatu oraz w centralce w dyżurce personelu.



www.callnet.online

CALLNET - wariant STANDARD

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią **GWARANCJĄ**.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.



Przycisk przywoławczy WP



- **ZASTOSOWANIE:**

Przycisk przywoławczy WP instalowany jest w salach chorych przy łóżkach oraz sanitariatach i przeznaczony jest do wezwania pomocy przez pacjentów.

- **DANE TECHNICZNE:**

Łącznik przyciskowy niestabilny zwierny osprzętu elektrycznego oznakowany piktogramem żelowym WEZWANIE z ramką pojedynczą.
Gabaryty: 90x90mm, wersja wtynkowa do puszek instalacyjnych fi. 60 mm.
Kolor: BIAŁY.

- **MONTAŻ:**

W salach przy łóżkach oraz sanitariatach, ok. 80-90 cm nad podłogą, w zasięgu ręki pacjenta.
Dołączany do lampy LS.
Urządzenie w wersji **WTYNKOWEJ** - wypust instalacji w puszcze wtynkowej fi.60mm.

- **FUNKCJONOWANIE:**

Przycisk przywoławczy umożliwia pacjentom wezwanie pomocy przez chwilowe jego wciśnięcie. Wezwanie zostaje zarejestrowane w lampie sygnalizacyjnej LS - sygnalizowane jest świeceniem lampy oraz w centralce w dyżurce personelu.



www.callnet.online

CALLNET - wariant STANDARD

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią **GWARANCJĄ**.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.



Przycisk kasujący WK



- **ZASTOSOWANIE:**

Przycisk kasujący WK instalowany jest wewnątrz pomieszczeń przy drzwiach wejściowych i przeznaczony jest do kasowania wezwań od pacjentów przez personel.

- **DANE TECHNICZNE:**

Łącznik przyciskowy niestabilny zwierny osprzętu elektrycznego oznakowany piktogramem żelowym KASOWANIE z ramką pojedynczą.
Gabaryty: 90x90mm, wersja wtykowa do puszki instalacyjnej fi. 60 mm.
Kolor: BIAŁY.

- **MONTAŻ:**

W salach i sanitariatach przy drzwiach wejściowych wewnątrz pomieszczenia, ok. 130-150 cm nad podłogą. Dołączany do lampy LS.
Urządzenie w wersji **WTYNKOWEJ** - wypust instalacji w puszcze wtykowej fi.60mm.

- **FUNKCJONOWANIE:**

Przycisk kasujący umożliwia pielęgniarkę skasowanie wezwania od pacjenta po wejściu do pomieszczenia.



www.callnet.online

CALLNET - wariant STANDARD

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.



Przyciski przywoławczy i kasujący WPK



• ZASTOSOWANIE:

Przyciski przywoławczy i kasujący WPK instalowane są wewnątrz pomieszczeń przy drzwiach wejściowych i przeznaczone są zarówno do wezwania pomocy przez pacjentów, jak i kasowania wezwań przez personel.

• DANE TECHNICZNE:

Łączniki przyciskowe niestabilne zwierne osprzętu elektrycznego w ramce podwójnej poziomej, oznakowane piktogramami żelowymi KASOWANIE i WEZWANIE.

Gabaryty: 162x90mm, wersja wtykowa do DWÓCH puszek instalacyjnych zespolonych fi.60mm
Kolor: BIAŁY.

• MONTAŻ:

W salach, sanitariatach, pokojach pobytu dziennego przy drzwiach wejściowych wewnątrz pomieszczenia, ok. 130-150 cm nad podłogą.

Dołączany do lampy LS.

Urządzenie w wersji **WTYNKOWEJ** - wypust instalacji w DWÓCH puszkach wtykowych zespolonych fi. 60mm (dla typowego osprzętu elektrycznego w podwójnej ramce poziomej).

• FUNKCJONOWANIE:

Przycisk kasujący umożliwia pielęgniarkę skasowanie wezwania od pacjenta po wejściu do pomieszczenia. Przycisk przywoławczy umożliwia pacjentom wezwanie pomocy przez chwilowe jego wciśnięcie. Wezwanie zostaje zarejestrowane w lampie sygnalizacyjnej LS - sygnalizowane jest świeceniem lampy oraz w centralce w dyżurce personelu.



www.callnet.online

CALLNET - wariant STANDARD

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.



Gniazdo manipulatora RJ14



- **ZASTOSOWANIE:**

Gniazda manipulatorów RJ14 instalowane są w salach chorych przy łóżkach i przeznaczone dla manipulatorów przywoławczych do wezwania pomocy przez pacjentów.

- **DANE TECHNICZNE:**

Gniazdo RJ14 typu 6p4c (moduł zaciskowy beznarzędziowy), z ramką pojedynczą.
Gabaryty: 90x90mm, wersja wtykowa do puszki instalacyjnej fi. 60 mm.
Kolor: BIAŁY.

- **MONTAŻ:**

W salach przy łóżkach, ok. 80-90 cm nad podłogą.
Dołączany do lampy LS.
Urządzenie w wersji **WTYNKOWEJ** - wypust instalacji w puszce wtykowej fi.60mm.

- **FUNKCJONOWANIE:**

Gniazdo manipulatora umożliwia jego podłączenie dla pacjentów, gdy wymagane jest aby źródło przywołania znajdowało się w zasięgu ręki pacjenta.

- **UWAGI:**

Zastosowanie innych gniazd RJ dla manipulatorów niż zalecane może spowodować niewłaściwe funkcjonowanie manipulatorów przywoławczych !



www.callnet.online

CALLNET - wariant STANDARD

Od 1967 roku jesteśmy
ekspertem w dziedzinie
systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów
przywoławczych dla
obiektów medycznych
i użyteczności publicznej
(WC dla niepełnosprawnych),
domów pomocy społecznej,
sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane
są z najwyższej jakości
podzespołów i obudów z
tworzywa ABS - objęte są
3-letnią **GWARANCJĄ**.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia
systemu Callnet spełniają
wymogi dyrektywy EMC i
oznakowane są europejskim
znakiem CE.



Przycisk przywoławczy i gniazdo manipulatora WPG



- **ZASTOSOWANIE:**

Przycisk przywoławczy i gniazdo manipulatora WPG instalowane są w salach chorych przy łóżkach i przeznaczone do wezwania pomocy przez pacjentów. W sytuacjach ciężkiego stanu pacjenta, istnieje możliwość okresowego wetknięcia do gniazda manipulatora przywoławczego na giętym przewodzie, ułatwiającego pacjentowi wezwanie pomocy.

- **DANE TECHNICZNE:**

Łącznik przyciskowy niestabilny zwierny osprzętu elektrycznego, oznakowany piktogramem żelowym WEZWANIE oraz gniazdo RJ14 typu 6p4c (moduł zaciskowy beznarzędziowy) w ramce podwójnej poziomej. Gabaryty: 162x90mm, wersja wtynkowa do DWÓCH puszek instalacyjnych zespolonych fi.60mm Kolor: BIAŁY.

- **MONTAŻ:**

W salach przy łóżkach, ok. 80-90 cm nad podłogą, w zasięgu ręki pacjenta.

Dołączany do lampy LS.

Urządzenie w wersji **WTYNKOWEJ** - wypust instalacji w DWÓCH puszkach wtynkowych zespolonych fi. 60mm (dla typowego osprzętu elektrycznego w podwójnej ramce poziomej).

- **FUNKCJONOWANIE:**

Przycisk przywoławczy jest podstawowym źródłem przywołania i umożliwia pacjentom wezwanie pomocy przez chwilowe jego wciśnięcie. Gniazdo manipulatora umożliwia okresowe jego podłączenie dla pacjentów w cięższym stanie, gdy wymagane jest aby źródło przywołania znajdowało się w zasięgu ręki pacjenta. Zestaw przywoławczy umożliwia inwestorom oszczędną realizację systemu przywoławczego i wyposażenie w manipulatory tylko wybranych stanowisk łóżkowych i tylko na niezbędny okres czasu.

- **UWAGI:**

Zastosowanie innych gniazd RJ dla manipulatorów niż zalecane może spowodować niewłaściwe funkcjonowanie manipulatorów przywoławczych !



www.callnet.online

CALLNET - wariant STANDARD

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią **GWARANCJĄ**.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.



Manipulator przywoławczy MP-W z przyciskiem wandaloodpornym i wieszakiem ściennym



- **ZASTOSOWANIE:**

Manipulator przywoławczy MP-W instalowany jest w salach chorych przy łóżkach i przeznaczony jest do wezwania pomocy przez pacjentów.

- **DANE TECHNICZNE:**

Gabaryty: 98x50/28x16 mm
Obudowa z tworzywa ABS (kolor jasny szary) pokryta białą folią poliestrową, **WANDALOODPORNY mechaniczny przycisk niklowany WEZWANIE o bardzo wysokiej trwałości (ok. 1 mln zadziałań)**.
Przewód giętki ok. 2 m zakończony wtykiem RJ14 typu 6p4c.
Napięcie robocze: 12V DC.
Opcjonalnie wieszak ścienny.

- **MONTAŻ:**

W salach przy łóżkach - gniazdo RJ14 typu 6p4c osadzone ok. 30-40 cm nad podłogą
- wypust instalacji w puszcze wtykowej fi.60mm (lub gniazdo z obudową natynkową).
Połączenie przewodowe z gniazda RJ14 do lampy LS.

- **FUNKCJONOWANIE:**

Manipulator przywoławczy MP-W umożliwia wezwanie pomocy pacjentom z sal chorych. Giętki przewód pozwala na umieszczenie urządzenia w zasięgu ręki chorego lub odwieszenie na wieszaku ściennym przy łóżku.
Chwilowe wciśnięcie przycisku WEZWANIE zostaje zarejestrowane w lampie sygnalizacyjnej LS i sygnalizowane jest świeceniem lampy nad drzwiami pomieszczenia oraz w centralce w dyżurce personelu.



www.callnet.online

CALLNET - wariant STANDARD

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.



Panel sygnalizacyjny CS15-R z opcją komputerowej rejestracji zdarzeń



• ZASTOSOWANIE:

Panel sygnalizacyjny przeznaczony jest do optycznej i akustycznej sygnalizacji wezwań od pacjentów w dyżurkach pielęgniarskich.

• DANE TECHNICZNE:

Pojemność: **do 15 pomieszczeń** (sale, sale z sanitariatami, sanitariaty zbiorcze), możliwość sygnalizacji z dwóch sąsiednich pomieszczeń jedną diodą (redukcja numerów).
Gabaryty: **290x215x40 mm**, obudowa natynkowa z tworzywa ABS pokryta folią klawiaturową z diodami LED SMD.
Aktywny poziom wejść: MASA (minus) - OPCJA komputerowej rejestracji i wizualizacji zdarzeń.
Zasilanie: z zewnętrznego zasilacza stabilizowanego DC 12V/1..3A, BRAK wyłącznika zasilania urządzeń systemu (w celu uniemożliwienia kasowania wezwań w centrali, bez udania się na miejsce zdarzenia).
Dwa sygnalizatory akustyczne przełączane wyłącznikiem GŁOŚNY/CICHY (praca nocna).
Możliwość dołączenia czterech paneli sygnalizacji dodatkowej PS4S oraz równolegle drugiego panelu CS15-R.
Przełącznik WYCISZENIA SYGNAŁU w pokrywie: do czasu skasowania wszystkich wezwań, centrala nie sygnalizuje ich akustycznie (również nowych wezwań, które nadeszły w trakcie).
OPCJONALNIE - zewnętrzny przycisk wyciszenia sygnału w wygodnym dla personelu miejscu (dzwonkowy).

• MONTAŻ:

W dyżurce pielęgniarskiej obok biurka, na wysokości ok. 160-170 cm nad podłogą.
Indywidualne połączenia przewodowe do lamp sygnalizacyjnych LS.
Urządzenie w wersji **NATYNKOWEJ** - zalecana puszką instalacyjną wtynkowa fi.60mm.

• FUNKCJONOWANIE:

Panel CS15-R sygnalizuje zdarzenia w oddziale:
- optycznie: zapalenie diody obok właściwego numeru sali,
- akustycznie: ciągły sygnał akustyczny.

• UWAGI:

Ze względu na aktywny poziom sygnału na wejściach MASA (minus), panel **CS15-R** nie jest kompatybilny z wycofanymi centralami PS12/18/24 i lampami LS-PA- może współpracować wyłącznie z nową generacją lamp serii CALLNET-Compact LS.



www.callnet.online

CALLNET - wariant STANDARD

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,


GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.

Przykład komputerowej rejestracji zdarzeń na oddziałach z centralami CS15-R

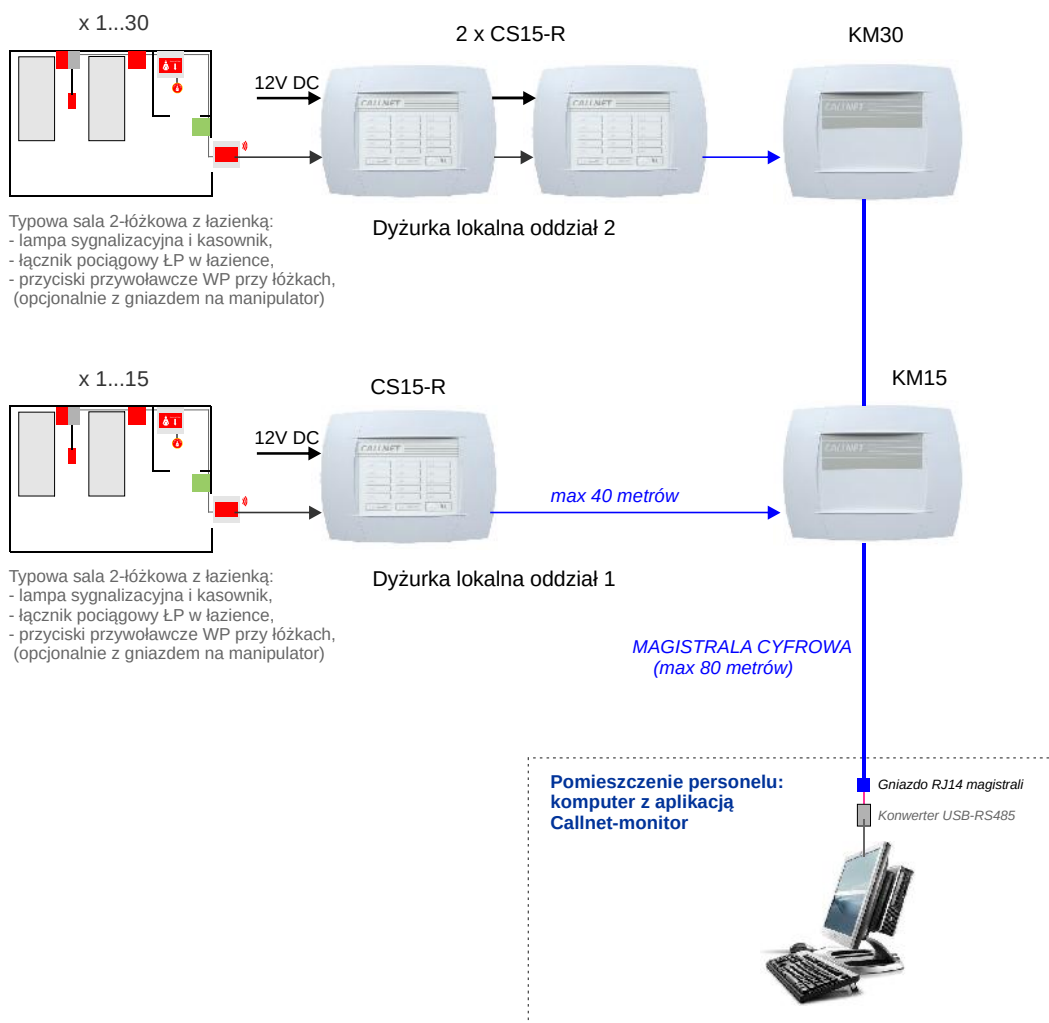

UWAGI:

- komputerowa rejestracja możliwa jest wyłącznie w wariantach z panelami CS15-R.
- aplikacja Callnet-Monitor umożliwia dołączenie 1..6 paneli CS15-R do koncentratorów magistralowych KM.



www.callnet.online

CALLNET - wariant STANDARD

Od 1967 roku jesteśmy
ekspertem w dziedzinie
systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów
przywoławczych dla
obiektów medycznych
i użyteczności publicznej
(WC dla niepełnosprawnych),
domów pomocy społecznej,
sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane
są z najwyższej jakości
podzespołów i obudów z
tworzywa ABS - objęte są
GWARANCJĄ do 5 lat.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia
systemu Callnet spełniają
wymogi dyrektywy EMC i
oznakowane są europejskim
znakiem CE.



Panel sygnalizacyjny CS22



• ZASTOSOWANIE:

Panel sygnalizacyjny przeznaczony jest do optycznej i akustycznej sygnalizacji wezwań od pacjentów
w dyżurkach personelu.

• DANE TECHNICZNE:

Pojemność: do 22 pomieszczeń (sale, sale z sanitariatami, sanitariaty zbiorcze).
Diody świecące z polami na numery sal oraz diody funkcyjne ALARM, PRACA NOCNA i ZASILANIE.
Dwa sygnalizatory akustyczne przełączane wyłącznikiem PRACA NOCNA (tryb cichy).
Wyłącznik WYCISZENIA SYGNAŁU: do czasu skasowania wszystkich wezwań, centrala nie sygnalizuje ich
akustycznie (również nowych wezwań, które nadeszły w trakcie).
Możliwość równoległego dołączenia drugiego panelu CS22.
Opcja dołączenia do 4 mini-central PS4S do akustycznego przekazywania wezwań do innych pomieszczeń personelu.
Gabaryty: **290x215x40 mm**, obudowa natynkowa z tworzywa ABS pokryta folią klawiaturową.
Zasilanie: z zewnętrznego zasilacza stabilizowanego 12V/3A, BRAK wyłącznika zasilania urządzeń systemu
(w celu uniemożliwienia kasowania wezwań w centrali, bez udania się na miejsce zdarzenia).
Polaryzacja aktywnego sygnału na wejściach: +12 V DC, brak opcji komputerowej rejestracji.

• MONTAŻ:

W dyżurce pielęgniarskiej obok biurka, na wysokości ok. 160-170 cm nad podłogą.
Indywidualne połączenia przewodowe do lamp LS.
Urządzenie w wersji **NATYNKOWEJ** - zalecane osadzenie puszki instalacyjnej wtynkowej fi. 60mm.

• FUNKCJONOWANIE:

Panel CS22 sygnalizuje w dyżurce personelu zdarzenia w oddziale:
- optycznie: zapalenie diody obok właściwego numeru pomieszczenia.
- akustycznie: ciągły sygnał akustyczny, aż do skasowania wezwania lub wyciszenia.
Sygnalizacja alarmu blokuje czasowo sygnalizację wezwań od pacjentów.

• UWAGI:

Ze względu na dodatkową polaryzację aktywnych sygnałów wejściowych, centrala CS22 jest kompatybilna
ze starszymi wersjami central: PS12/15/18/24 oraz PS24-CYF.



www.callnet.online

CALLNET - wariant STANDARD

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.



Seria COMPACT - panel sygnalizacyjny PS4S



• ZASTOSOWANIE:

Panel sygnalizacyjny PS4S z serii CALLNET-COMPACT przeznaczony jest do optycznej i akustycznej sygnalizacji wezwań od pacjentów w dyżurkach pielęgniarskich małych oddziałów (do 4 pomieszczeń).

• DANE TECHNICZNE:

Gabaryty: 120x80x25mm, obudowa natynkowa z tworzywa ABS w kolorze białym, folia poliestrowa.
Pojemność: 4 sale/sanitariaty, diody świecące z polami na opis numerów
Sygnalizator akustyczny, wyłącznik sygnału akustycznego wraz z diodą sygnalizacyjną.
Napięcie robocze: 12V DC z zewnętrznego zasilacza STABILIZOWANEGO.

• MONTAŻ:

W dyżurce personelu obok biurka, na wysokości ok. 120-160 cm nad podłogą.
Indywidualne połączenia przewodowe z lampami sygnalizacyjnymi LS.
Urządzenie w wersji **NATYNKOWEJ**, zalecana puszka instalacyjna fi. 60mm.

• FUNKCJONOWANIE:

Panel PS4S sygnalizuje wezwania:
- optycznie (zawsze): zapalenie diody obok właściwego numeru sali lub sanitariatu,
- akustycznie (tylko przy włączonym sygnalizatorze): ciągły sygnał akustyczny.



www.callnet.online

CALLNET - wariant STANDARD

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią **GWARANCJĄ**.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.



Seria COMPACT - PS4S opcja przekazywania zgłoszeń



• ZASTOSOWANIE:

Panel sygnalizacji PS4S z serii CALLNET-COMPACT instalowany jest w dodatkowych dyżurkach personelu i przeznaczony do przekierowywania wezwań od pacjentów z głównej centrali systemu (bez identyfikacji numeru pomieszczenia, co realizuje centrala w dyżurce pielęgniarskiej).

• DANE TECHNICZNE:

Gabaryty: 120x80x25mm, obudowa natynkowa z tworzywa ABS w kolorze białym, folia poliestrowa. Cztery diody LED, sygnalizator akustyczny, wyłącznik sygnału akustycznego. Połączenie przewodowe z panelem CS15-R lub CS22 w dyżurce główne.

• MONTAŻ:

W dyżurce personelu obok biurka, na wysokości ok. 110-160 cm nad podłogą. Połączenie przewodowe z panelem CS15-R lub CS22. Urządzenie w wersji **NATYNKOWEJ** - zalecana puszka instalacyjna wtykowa fi.60mm.

• FUNKCJONOWANIE:

Panel PS4S sygnalizuje wezwania zarejestrowane w centrali głównej systemu:
- optycznie (zawsze): zapalenie diody LED z numerem 1...4 (może być przyporządkowana centralom 1...4),
- akustycznie (tylko przy włączonym sygnalizatorze): ciągły sygnał akustyczny.



www.callnet.online