

Od 1967 roku jesteśmy
ekspertem w dziedzinie
systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów
przywoławczych dla
obiektów medycznych
i użyteczności publicznej
(WC dla niepełnosprawnych),
domów pomocy społecznej,
sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane
są z najwyższej jakości
podzespołów i obudów z
tworzywa ABS - objęte są
3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia
systemu Callnet spełniają
wymogi dyrektywy EMC i
oznakowane są europejskim
znakiem CE.



KARTY KATALOGOWE URZĄDZEŃ SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO w wariancie UPROSZCZONYM z modułami MMPK.



CALLNET - wariant UPROSZCZONY

Mini-moduł przywoławczo kasujący MMPK - przykład realizacji wariantu UPROSZCZONEGO bez lamp sygnalizacyjnych.

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA


Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.



WEZWANIA Z SAL I SANITARIATÓW:

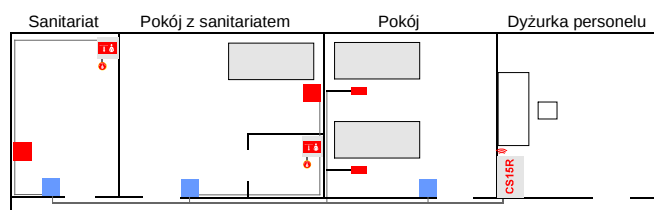

Urządzenia systemu Callnet:

- CS15R - panel sygnalizacyjny CS15-R
- łączniki pociągowe
- przyciski kasujące z modulem MMPK
- przyciski przywoławcze WP
- manipulatory przywoławcze MP-W

• CHARAKTERYSTYKA:

- możliwość wezwania pomocy z sal oraz sanitariatów w obiektach gdzie nie jest wymagane zainstalowanie lamp sygnalizacyjnych nad drzwiami pomieszczeń,
- zachowanie najważniejszej cechy systemu przywoławczego: kasowanie wezwań wyłącznie w miejscu ich włączenia przez pacjenta - indywidualne kasowniki w salach i sanitariatach,
- współpraca ze standardowymi centralami CALLNET CS15-R,
- opcja komputerowej rejestracji wezwań z central CS15-R.

• FUNKCJONOWANIE:

Chwilowe wciśnięcie przycisku w manipulatorze przywoławczym, zwarcie przycisków przywoławczych lub łączników pociągowych zostaje zarejestrowane w module MMPK i przekazywana jest informacja o zgłoszeniu do dyżurki pielęgniarskiej; zaświecona w panelu CS15-R dioda LED obok numeru pomieszczenia oraz sygnał akustyczny. Kasowanie wezwań następuje przyciskiem kasującym po przybyciu pielęgniarki na miejsce wezwania.



www.callnet.online

CALLNET - wariant UPROSZCZONY

Mini-moduł przywoławczo kasujący MMPK.

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET


Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.

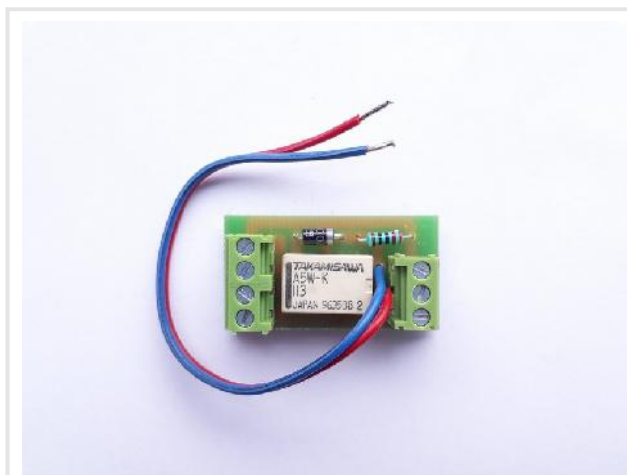

• ZASTOSOWANIE:

Mini-moduł przywoławczo-kasujący zawiera układ rejestrujący wezwania i umożliwia realizację wariantu systemu CALLNET bez lamp sygnalizacyjnych. Moduł umieszcza się w kasowniku, pod przyciskiem w puszcze instalacyjnej (lub obudowie natynkowej) i do wejścia doprowadza się źródła wezwań, a wyjście dołącza się do standardowej centrali CS15-R.

• DANE TECHNICZNE:

Gabaryty: 36x20x14 mm, kabel ok. 10 cm do kasownika.
Wejście wezwań z przycisków lub łączników pociągowych, wiązka kablowa do przycisku kasowania
Wyjście sygnalizacyjne: z polaryzacją MINUS (MASA) do centrali CS15-R.
Napięcie robocze: 12V DC z centrali (koncentratora).

• MONTAŻ:

Moduł umieszcza się w puszcze instalacyjnej fi. 60 pod przyciskiem kasującym - minimalna głębokość puszki wynosi 40 mm (zalecana jest głębokość 60 mm).

• FUNKCJONOWANIE:

Chwilowe zwarcie przycisków przywoławczych, manipulatorów lub łączników pociągowych zostaje zarejestrowane w module, do czasu skasowania przyciskiem kasującym.
Jednocześnie do centrali w dyżurce pielęgnarskiej przekazywana jest informacja o zgłoszeniu - zaświecona w panelu dioda LED obok numeru pomieszczenia oraz sygnał akustyczny.



www.callnet.online

CALLNET - wariant UPROSZCZONY

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.



Przycisk kasujący WK



- **ZASTOSOWANIE:**

Przycisk kasujący WK instalowany jest wewnątrz pomieszczeń przy drzwiach wejściowych i przeznaczony jest do kasowania wezwań od pacjentów przez personel.

- **DANE TECHNICZNE:**

Łącznik przyciskowy niestabilny zwierny osprzętu elektrycznego oznakowany piktogramem żelowym KASOWANIE z ramką pojedynczą.

Gabaryty: 90x90mm, wersja wtynkowa do puszek instalacyjnych fi. 60mm (głębokość min. 40mm, zalecana 60mm). Kolor: BIAŁY.

- **MONTAŻ:**

W salach i sanitariatach przy drzwiach wejściowych wewnątrz pomieszczenia, ok. 130-150 cm nad podłogą. Dołączany do modułu MMPK.

Urządzenie w wersji **WTYNKOWEJ** - wypust instalacji w puszcze wtynkowej fi.60mm, minimalna głębokość puszek wynosi 40 mm (zalecana jest głębokość 60 mm).

- **FUNKCJONOWANIE:**

Przycisk kasujący umożliwia pielęgniarkę skasowanie wezwania od pacjenta po wejściu do pomieszczenia.



www.callnet.online

CALLNET - wariant UPROSZCZONY

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.



Przycisk przywoławczy WP



- **ZASTOSOWANIE:**

Przycisk przywoławczy WP instalowany jest w salach chorych przy łóżkach oraz sanitariatach i przeznaczony jest do wezwania pomocy przez pacjentów.

- **DANE TECHNICZNE:**

Łącznik przyciskowy niestabilny zwierny osprzętu elektrycznego oznakowany piktogramem żelowym WEZWANIE z ramką pojedynczą.
Gabaryty: 90x90mm, wersja wtynkowa do puszki instalacyjnej fi. 60 mm.
Kolor: BIAŁY.

- **MONTAŻ:**

W salach przy łóżkach oraz sanitariatach, ok. 80-90 cm nad podłogą, w zasięgu ręki pacjenta. Dołączany do modułu MMPK.
Urządzenie w wersji **WTYNKOWEJ** - wypust instalacji w puszce wtynkowej fi.60mm.
Dostępna jest również wersja natynkowa z innej serii osprzętu.

- **FUNKCJONOWANIE:**

Przycisk przywoławczy umożliwia pacjentom wezwanie pomocy przez chwilowe jego wciśnięcie. Wezwanie zostaje zarejestrowane w module MMPK i sygnalizowane jest w centralce w dyżurce personelu.



www.callnet.online

CALLNET - wariant UPROSZCZONY

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.



Przyciski przywoławczy i kasujący WPK



• ZASTOSOWANIE:

Przyciski przywoławczy i kasujący WPK instalowane są wewnątrz pomieszczeń przy drzwiach wejściowych i przeznaczone są zarówno do wezwania pomocy przez pacjentów, jak i kasowania wezwań przez personel. Pod przyciskiem kasującym umieszczony jest moduł MMPK.

• DANE TECHNICZNE:

Łączniki przyciskowe niestabilne zwierne osprzętu elektrycznego w ramce podwójnej poziomej, oznakowane piktogramami żelowymi KASOWANIE i WEZWANIE.
Gabaryty: 162x90mm, wersja wtynkowa do DWÓCH puszek instalacyjnych zespolonych fi.60mm o minimalnej głębokości 40 mm (zalecana 60 mm).
Kolor: BIAŁY.

• MONTAŻ:

W salach, sanitariatach, pokojach pobytu dziennego przy drzwiach wejściowych wewnątrz pomieszczenia, ok. 130-150 cm nad podłogą.
Dołączany do modułu MMPK.
Urządzenie w wersji **WTYNKOWEJ** - wypust instalacji w DWÓCH puszkach wtynkowych zespolonych fi. 60mm (dla typowego osprzętu elektrycznego w podwójnej ramce poziomej), minimalna głębokość puszek wynosi 40 mm (zalecane są głębokie 60 mm).

• FUNKCJONOWANIE:

Przycisk kasujący umożliwia pielęgniarce skasowanie wezwania od pacjenta po wejściu do pomieszczenia. Przycisk przywoławczy umożliwia pacjentom wezwanie pomocy przez chwilowe jego wciśnięcie. Wezwanie zostaje zarejestrowane w module MMPK i sygnalizowane jest w centralce w dyżurce personelu.



www.callnet.online

CALLNET - wariant UPROSZCZONY

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.



Gniazdo manipulatora RJ14



- **ZASTOSOWANIE:**

Gniazda manipulatorów RJ14 instalowane są w salach chorych przy łóżkach i przeznaczone dla manipulatorów przywoławczych do wezwania pomocy przez pacjentów.

- **DANE TECHNICZNE:**

Gniazdo RJ14 typu 6p4c (moduł zaciskowy beznarzędziowy), z ramką pojedynczą. Gabaryty: 90x90mm, wersja wtynkowa do puszki instalacyjnej fi. 60 mm. Kolor: BIAŁY.

- **MONTAŻ:**

W salach przy łóżkach, ok. 80-90 cm nad podłogą.
Dołączany do modułu MMPK.
Urządzenie w wersji **WTYNKOWEJ** - wypust instalacji w puszcze wtynkowej fi.60mm.
Dostępna jest również wersja natynkowa z innej serii osprzętu.

- **FUNKCJONOWANIE:**

Gniazdo manipulatora umożliwia jego podłączenie dla pacjentów, gdy wymagane jest aby źródło przywołania znajdowało się w zasięgu ręki pacjenta.

- **UWAGI:**

Zastosowanie innych gniazd RJ dla manipulatorów niż zalecane może spowodować niewłaściwe funkcjonowanie manipulatorów przywoławczych !



www.callnet.online

CALLNET - wariant UPROSZCZONY

Manipulator przywoławczy MP-W z przyciskiem wandaloodpornym i opcjonalnym wieszakiem ściennym

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.



- **ZASTOSOWANIE:**

Manipulator przywoławczy MP-W instalowany jest w salach chorych przy łóżkach i przeznaczony jest do wezwania pomocy przez pacjentów.

- **DANE TECHNICZNE:**

Gabaryty: 98x50/28x16 mm
Obudowa z tworzywa ABS (kolor jasny szary) pokryta białą folią poliestrową, **WANDALOODPORNY mechaniczny przycisk niklowany WEZWANIE o bardzo wysokiej trwałości (ok. 1 mln zadziałań)**.
Przewód giętki ok. 2 m zakończony wtykiem RJ14 typu 6p4c.
Napięcie robocze: 12V DC.
Opcjonalnie wieszak ścienny.

- **MONTAŻ:**

W salach przy łóżkach - gniazdo RJ14 typu 6p4c osadzone ok. 30-40 cm nad podłogą - wypust instalacji w puszcze wtykowej fi.60mm (lub gniazdo z obudową natynkową).
Połączenie przewodowe z gniazda RJ14 do modułu MMPK.

- **FUNKCJONOWANIE:**

Manipulator przywoławczy MP-W umożliwia wezwanie pomocy pacjentom z sal chorych. Giętki przewód pozwala na umieszczenie urządzenia w zasięgu ręki chorego lub odwieszenie na wieszaku ściennym przy łóżku.
Chwilowe wciśnięcie przycisku WEZWANIE zostaje zarejestrowane w module MMPK i sygnalizowane jest w centralce w dyżurce personelu.



www.callnet.online

CALLNET - wariant UPROSZCZONY

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.



Seria COMPACT - łącznik pociągowy ŁP



- **ZASTOSOWANIE:**

Natynkowy łącznik pociągowy ŁP z serii CALLNET-COMPACT instalowany jest wewnątrz sanitariatów i przeznaczony jest do wezwania pomocy przez pacjentów (także w przypadku upadku na podłogę).

- **DANE TECHNICZNE:**

Gabaryty: 80x80x25 mm, obudowa natynkowa z tworzywa ABS w kolorze białym, folia poliestrowa. Brelok w kolorze czerwonym z piktogramem żelowym, sznur ok.185 cm. Dodatkowa naklejka żelowa "WEZWANIE" na glazurę.

- **MONTAŻ:**

W sanitariatach ok. 200-220 cm nad podłogą.
Dołączany do modułu MMPK.
Urządzenie w wersji **NATYNKOWEJ** - zalecana puszka instalacyjna wtynkowa fi.60mm.

- **FUNKCJONOWANIE:**

Łącznik pociągowy jest źródłem wezwania dla pacjentów przebywających w sanitariatach, umożliwiając im wezwanie pomocy również w przypadkach upadku na podłogę. Pociągnięcie sznura z brelokiem oznakowanym piktogramem WEZWANIE, aktywuje wezwanie zarejestrowane w module MMPK i sygnalizowane jest w centralce w dyżurce personelu.



www.callnet.online

CALLNET - wariant UPROSZCZONY

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.



Panel sygnalizacyjny CS15-R z opcją komputerowej rejestracji zdarzeń



• ZASTOSOWANIE:

Panel sygnalizacyjny przeznaczony jest do optycznej i akustycznej sygnalizacji wezwań od pacjentów w dyżurkach pielęgniarskich.

• DANE TECHNICZNE:

Pojemność: do 15 pomieszczeń (sale, sale z sanitariatami, sanitariaty zbiorcze).
Gabaryty: **290x215x40 mm**, obudowa natynkowa z tworzywa ABS pokryta folią klawiaturową z diodami LED SMD.
Aktywny poziom wejść: MINUS (MASA).
OPCJA komputerowej rejestracji wezwań z panelu CS15-R (opis w dokumentacji REJESTRACJA-PC).
Zasilanie: z zewnętrznego zasilacza stabilizowanego DC 12V/1..3A, BRAK wyłącznika zasilania urządzeń systemu.
Dwa sygnalizatory akustyczne przełączane wyłącznikiem GŁOŚNY/CICHY (praca nocna).
Możliwość dołączenia paneli sygnalizacji dodatkowej PS4S oraz równolegle drugiego panelu CS15-R.
Przełącznik WYCISZENIA SYGNAŁU w pokrywie: do czasu skasowania wszystkich wezwań, centrala nie sygnalizuje ich akustycznie (również nowych wezwań, które nadeszły w trakcie).

• MONTAŻ:

W dyżurce pielęgniarskiej obok biurka, na wysokości ok. 160-170 cm nad podłogą.
Indywidualne połączenia przewodowe do modułów MMPK.
Urządzenie w wersji **NATYNKOWEJ** - zalecana puszką instalacyjna wtykowa fi.60mm.

• FUNKCJONOWANIE:

Panel CS15-R sygnalizuje zdarzenia w oddziale:
- optycznie: zapalenie diody obok właściwego numeru pomieszczenia,
- akustycznie: ciągły sygnał akustyczny.



www.callnet.online

CALLNET - wariant UPROSZCZONY

Od 1967 roku jesteśmy
ekspertem w dziedzinie
systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów
przywoławczych dla
obiektów medycznych
i użyteczności publicznej
(WC dla niepełnosprawnych),
domów pomocy społecznej,
sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane
są z najwyższej jakości
podzespołów i obudów z
tworzywa ABS - objęte są
GWARANCJĄ do 5 lat.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia
systemu Callnet spełniają
wymogi dyrektywy EMC i
oznakowane są europejskim
znakiem CE.



Panel sygnalizacyjny CS22



• ZASTOSOWANIE:

Panel sygnalizacyjny przeznaczony jest do optycznej i akustycznej sygnalizacji wezwań od pacjentów
w dyżurkach personelu.

• DANE TECHNICZNE:

Pojemność: do 22 pomieszczeń (sale, sale z sanitariatami, sanitariaty zbiorcze).
Diody świecące z polami na numery sal oraz diody funkcyjne ALARM, PRACA NOCNA i ZASILANIE.
Dwa sygnalizatory akustyczne przełączane wyłącznikiem PRACA NOCNA (tryb cichy).
Wyłącznik WYCISZENIA SYGNAŁU: do czasu skasowania wszystkich wezwań, centrala nie sygnalizuje ich
akustycznie (również nowych wezwań, które nadeszły w trakcie).
Możliwość równoległego dołączenia drugiego panelu CS22.
Opcja dołączenia do 4 mini-central PS4S do akustycznego przekazywania wezwań do innych pomieszczeń personelu.
Gabaryty: **290x215x40 mm**, obudowa natynkowa z tworzywa ABS pokryta folią klawiaturową.
Zasilanie: z zewnętrznego zasilacza stabilizowanego 12V/3A, BRAK wyłącznika zasilania urządzeń systemu
(w celu uniemożliwienia kasowania wezwań w centrali, bez udania się na miejsce zdarzenia).
Polaryzacja aktywnego sygnału na wejściach: +12 V DC, brak opcji komputerowej rejestracji.

• MONTAŻ:

W dyżurce pielęgniarskiej obok biurka, na wysokości ok. 160-170 cm nad podłogą.
Indywidualne połączenia przewodowe z modułów MMPK.
Urządzenie w wersji **NATYNKOWEJ** - zalecane osadzenie puszki instalacyjnej wtynkowej fi. 60mm.

• FUNKCJONOWANIE:

Panel CS22 sygnalizuje w dyżurce personelu zdarzenia w oddziale:
- optycznie: zapalenie diody obok właściwego numeru pomieszczenia.
- akustycznie: ciągły sygnał akustyczny, aż do skasowania wezwania lub wyciszenia.
Sygnalizacja alarmu blokuje czasowo sygnalizację wezwań od pacjentów.



www.callnet.online