

CALLNET - CS15-R - komputerowa rejestracja

Od 1967 roku jesteśmy
ekspertem w dziedzinie
systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów
przywoławczych dla
obiektów medycznych
i użyteczności publicznej
(WC dla niepełnosprawnych),
domów pomocy społecznej,
sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane
są z najwyższej jakości
podzespołów i obudów z
tworzywa ABS - objęte są
3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia
systemu Callnet spełniają
wymogi dyrektywy EMC i
oznakowane są europejskim
znakiem CE.

KARTY KATALOGOWE

KOMPUTEROWA REJESTRACJA ZDARZEŃ W WARIANTACH Z CENTRALAMI CS15-R.



www.callnet.online

CALLNET - CS15-R - komputerowa rejestracja

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.

Panel sygnalizacyjny CS15-R z opcją komputerowej rejestracji zdarzeń



• ZASTOSOWANIE:

Panel sygnalizacyjny przeznaczony jest do optycznej i akustycznej sygnalizacji wezwań od pacjentów w dyżurkach pielęgniarskich.

• DANE TECHNICZNE:

Pojemność: **do 15 pomieszczeń** (sale, sale z sanitariatami, sanitariaty zbiorcze), możliwość sygnalizacji z dwóch sąsiednich pomieszczeń jedną diodą (redukcja numerów).
Gabaryty: **290x215x40 mm**, obudowa natynkowa z tworzywa ABS pokryta folią klawiaturową z diodami LED SMD.
Aktywny poziom wejść: MASA (minus) - bezpośrednia współpraca z koncentratorami magistralowymi KM.
Zasilanie: z zewnętrznego zasilacza stabilizowanego DC 12V/1..3A, BRAK wyłącznika zasilania urządzeń systemu (w celu uniemożliwienia kasowania wezwań w centrali, bez udania się na miejsce zdarzenia).
Dwa sygnalizatory akustyczne przełączane wyłącznikiem GŁOŚNY/CICHY (praca nocna).
Możliwość dołączenia czterech paneli sygnalizacji dodatkowej PS4S oraz równolegle drugiego panelu CS15-R.
Przełącznik WYCISZENIA SYGNAŁU w pokrywie: do czasu skasowania wszystkich wezwań, centrala nie sygnalizuje ich akustycznie (również nowych wezwań, które nadeszły w trakcie).
OPCJONALNIE - zewnętrzny przycisk wyciszenia sygnału w wygodnym dla personelu miejscu (dzwonkowy).

• MONTAŻ:

W dyżurce pielęgniarskiej obok biurka, na wysokości ok. 160-170 cm nad podłogą.
Indywidualne połączenia przewodowe do lamp sygnalizacyjnych LS.
Urządzenie w wersji **NATYNKOWEJ** - zalecana puszka instalacyjna wtynkowa fi.60mm.

• FUNKCJONOWANIE:

Panel CS15-R sygnalizuje zdarzenia w oddziale:
- optycznie: zapalenie diody obok właściwego numeru sali,
- akustycznie: ciągły sygnał akustyczny.

• UWAGI:

Ze względu na aktywny poziom sygnału na wejściach MASA (minus), panel **CS15-R** nie jest kompatybilny z wycofanymi centralami PS12, 24 i 18 - może współpracować wyłącznie z nową generacją lamp LS.



www.callnet.online

CALLNET - CS15-R - komputerowa rejestracja

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.



Koncentrator magistralowy KM



• ZASTOSOWANIE:

Koncentrator magistralowy przeznaczony jest do konwersji sygnałów wezwań od pacjentów z central CS15-R na cyfrową magistralę dołączoną wprost do komputera w dyżurce personelu. Pojedynczy koncentrator KM15 może obsługiwać jedną centralę CS15-R, natomiast koncentrator KM30 DWIE centrale CS15-R.

• DANE TECHNICZNE:

Gabaryty: 290x215x40 mm, obudowa natynkowa z tworzywa ABS.
Pojemność: 15 lub 30 pomieszczeń - jedna lub dwie centrale PS15-R.
Wyjście: magistrala RS485 dołączona do komputera w dyżurce personelu.
Napięcie robocze: 12V DC z zasilacza STABILIZOWANEGO systemu CALLNET (z centrali CS15-R).
Wyjście SYGNAŁ dla sygnalizatorów sprzętowych PS4S.

• MONTAŻ:

W rozdzielni, szachcie słaboprądowym, nad stropem podwieszanym - w pobliżu central CS15-R.

• FUNKCJONOWANIE:

Koncentrator odbiera sygnały wezwań z central CS15-R i konwertuje je do standardu magistrali cyfrowej RS485. Sygnały z maksymalnie 1..3 konwerterów KM30 lub 1...6 KM15 dołączonych do magistrali (max. do 80 metrów), przekazywane są do komputera PC w dyżurce personelu, gdzie pracuje oprogramowanie Callnet-Monitor.



www.callnet.online

CALLNET - CS15-R - komputerowa rejestracja

Komputer z oprogramowaniem Callnet-monitor

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA

Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią GWARANCJĄ.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.



• ZASTOSOWANIE:

Aplikacja Callnet-monitor pracuje na komputerze w dyżurce personelu połączonym z magistralą cyfrową i odbiera informacje o zdarzeniach w systemie przywoławczym (WEZWANIA i KASOWANIA) oraz archiwizuje je na dysku komputera w postaci zaszyfrowanej algorytmem 3DES (niemożliwa jest edycja zapisanych zdarzeń). Jednocześnie umożliwia wizualizację bieżących wezwań oraz ich sygnalizację akustyczną komunikatami głosowymi (podawany jest numer pomieszczenia). Aplikacja pozwala na tworzenie raportów dziennych o zdarzeniach (z dokładnym czasem wezwań i ich obsługi). **Dodatkowo, możliwe jest powiadamianie SMS personelu o wezwaniach (z identyfikacją sali).**

• CHARAKTERYSTYKA:

- **niezależny komputer w dyżurce personelu z aplikacją Callnet-monitor, BEZ dostępu do internetu (zablokowanie automatycznych aktualizacji),**
- nowoczesne oprogramowanie dla systemów Microsoft's Windows 10,
- obsługa 1...6 koncentratorów magistralowych: **do 90 numerów (pomieszczeń),**
- wizualizacja zdarzeń oraz komunikaty głosowe (numer pomieszczenia),
- archiwizacja wezwań oraz ich skasowania wraz z dokładnym czasem - **zapis szyfrowany 3DES,**
- możliwość sporządzania i drukowania raportów o przebiegu zdarzeń dla wybranego dnia,
- **powiadamianie SMS personelu o wezwaniach na telefon komórkowy.**



www.callnet.online

CALLNET - CS15-R - komputerowa rejestracja

Od 1967 roku jesteśmy ekspertem w dziedzinie systemów przywoławczych.

CALLNET

Kilka wersji systemów przywoławczych dla obiektów medycznych i użyteczności publicznej (WC dla niepełnosprawnych), domów pomocy społecznej, sanatoriów,

GWARANCJA


Nasze urządzenia wykonane są z najwyższej jakości podzespołów i obudów z tworzywa ABS - objęte są 3-letnią **GWARANCJĄ**.

CERTYFIKATY

Wszystkie urządzenia systemu Callnet spełniają wymogi dyrektywy EMC i oznakowane są europejskim znakiem CE.



Modem-nadajnik SMS - powiadamianie

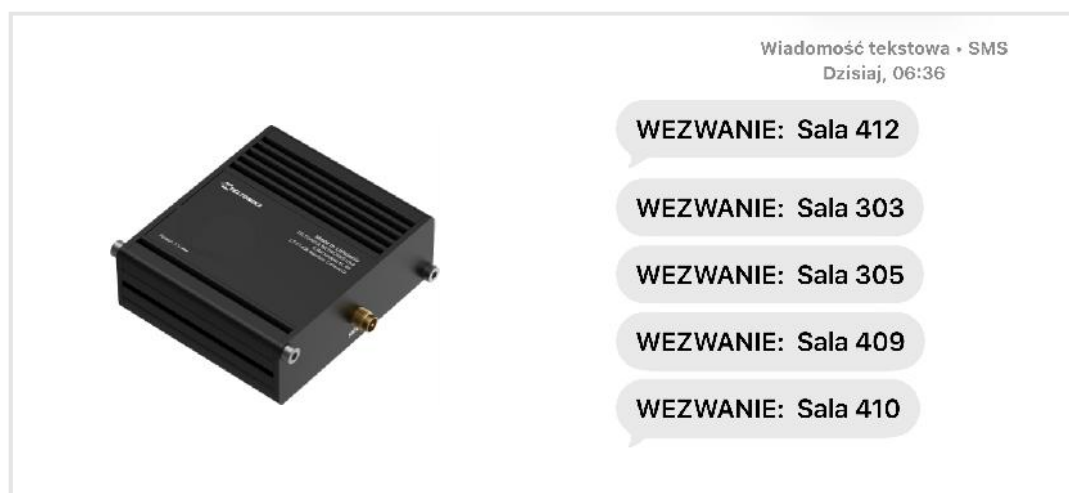

• ZASTOSOWANIE:

Modem-nadajnik GSM dołącza się do komputera do portu USB (1 m). Modem wysyła poprzez sieć GSM powiadomienia SMS na telefon personelu o wezwaniach, z pełną identyfikacją numeru pomieszczenia.

• DANE TECHNICZNE:

Gabaryty: 290x215x40 mm, obudowa natynkowa z tworzywa ABS.
Karta SIM 3/4/5 G dowolnego operatora sieci komórkowej.
Połączenie z komputerem kablem USB.

• MONTAŻ:

W dyżurce personelu obok komputera z oprogramowaniem CallnetMonitorSMS.

• FUNKCJONOWANIE:

Modem-nadajnik GSM w momencie pojawienia się wezwania od pacjenta zarejestrowanego w aplikacji wysyła powiadomienie SMS do zdefiniowanego telefonu personelu, z pełną identyfikacją sal (np. "WEZWANIE Sala315").

• UWAGI:

Koszty wysyłania powiadomień SMS ponosi wyłącznie użytkownik systemu, w zależności od wybranej taryfy dla karty SIM.



www.callnet.online